



Going further  
for health

# Veroval Medi.connect

Guide de démarrage facile

SH  
7/6/17

# Table des matières

1. Installation de Veroval®-medi.connect	Page 3
2. Installation de votre tensiomètre	Page 14
3. Installation de votre ECG	Page 21
4. Installation de votre pèse-personne	Page 28
5. Synchronisation de vos mesures en ligne	Page 36
6. Partage de vos mesures	Page 38
7. Introduction manuelle de vos paramètres de santé	Page 43

Allez sur [www.veroval.be](http://www.veroval.be), cliquez sur medi.connect



# Sur la page medi.connect, cliquez sur Veroval medi.connect login pour télécharger le logiciel

Vos paramètres vitaux en un seul clic



Login


Cliquez ici pour vous connecter à medi.connect



Veroval medi.connect Login


Cliquez ici pour télécharger le logiciel medi.connect

## Dans l'onglet qui s'ouvre, cliquez sur « save » et ensuite installez le programme


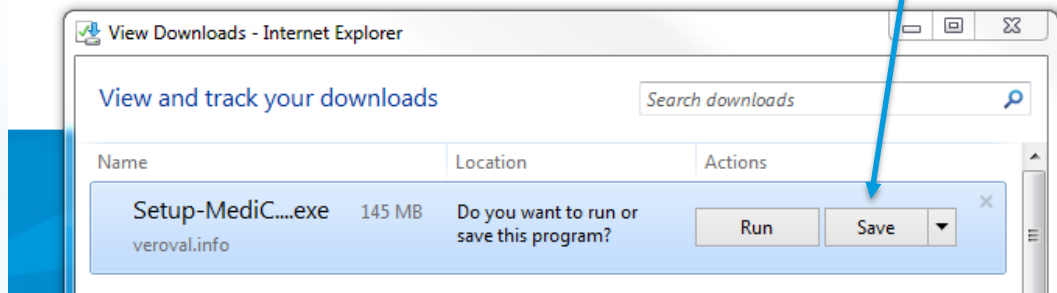


# Lorsque le programme est installé, démarrez Medi-connect avec un double clic.


1. Choisissez la langue :

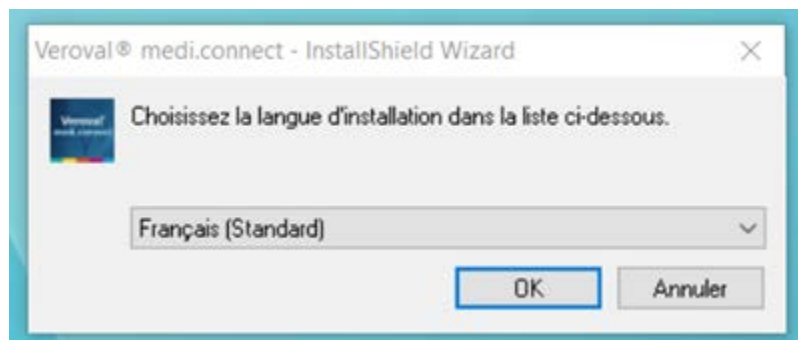


2. Accepter et valider les onglets suivants :

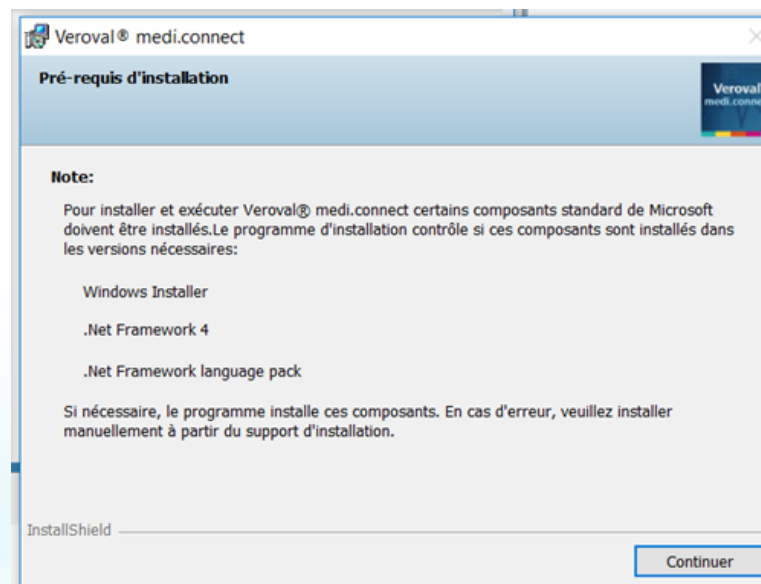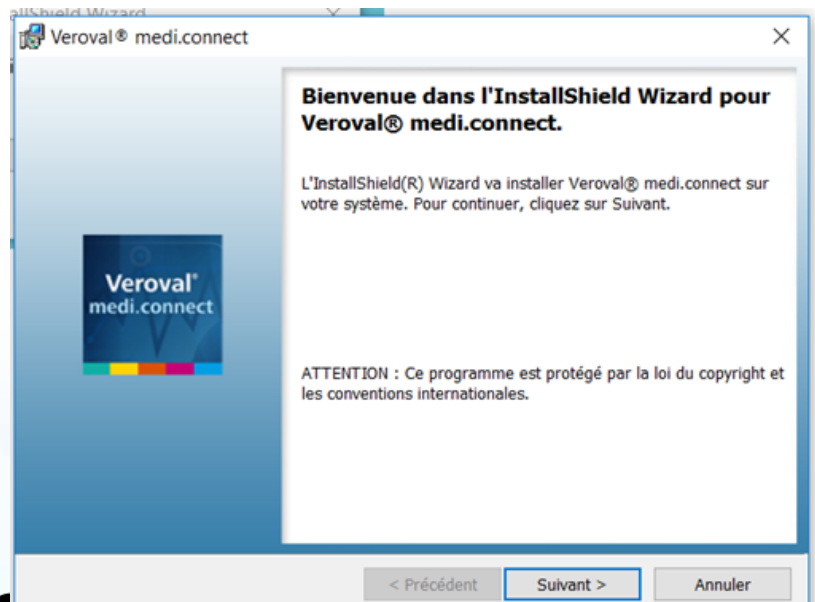

# Terminer l'installation et lancez le programme

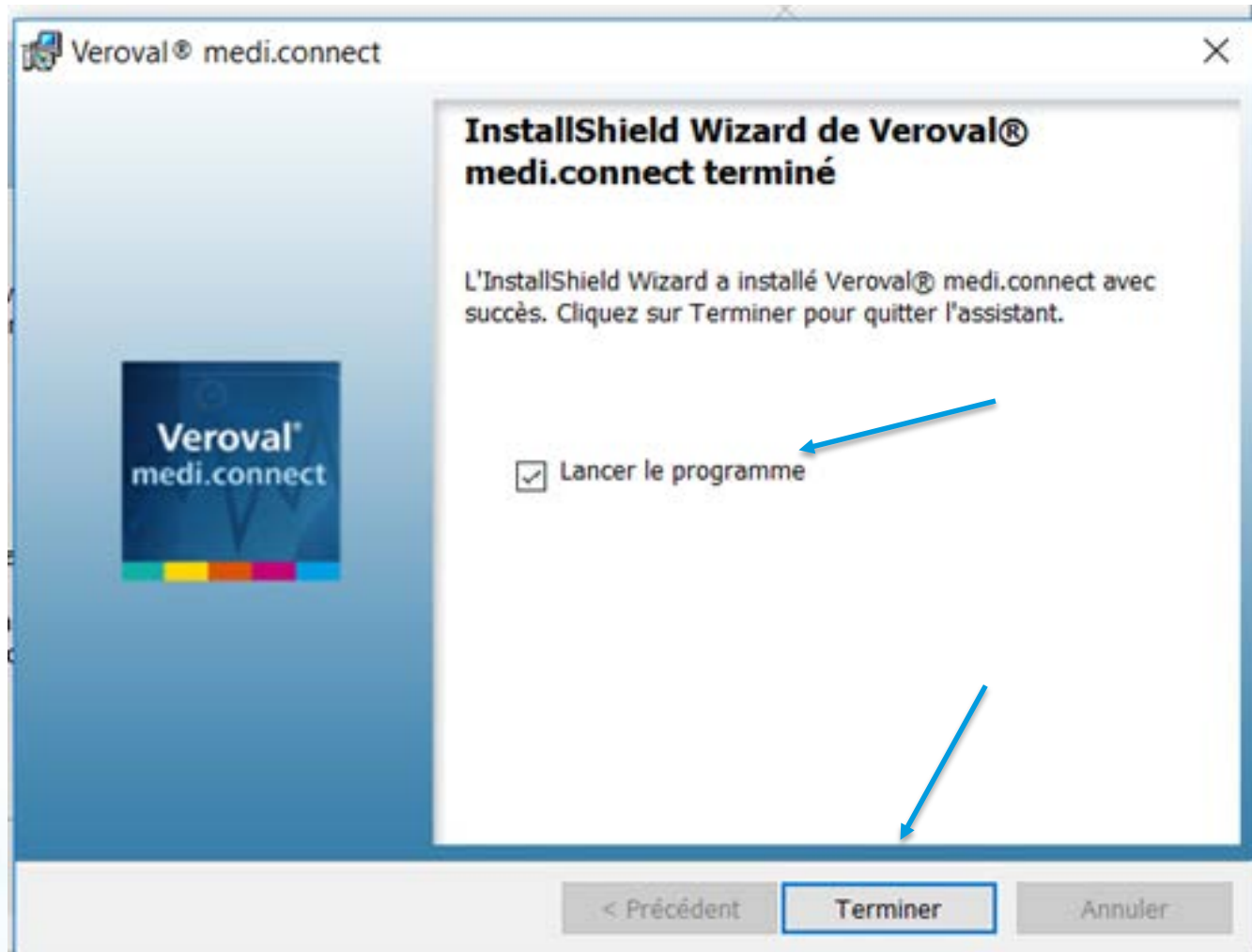

Création de votre compte : dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur « non » si vous n'avez pas encore de profil enregistré.

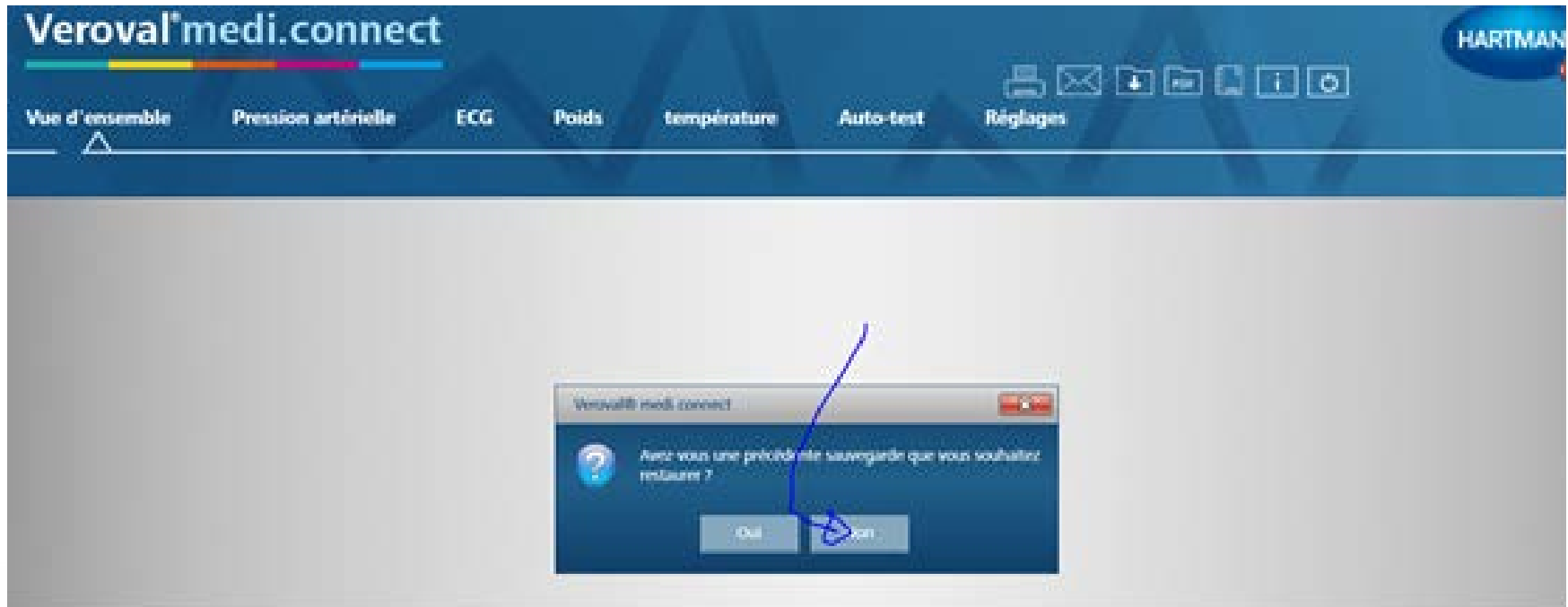

# Remplissez tous les champs suivants :

Mon profil

Système Pression artérielle ECG Poids température Mémoires

Mon profil

Ajouter un utilisateur

Sexe  Masculin  Féminin Rue

Prénom Code postal

Nom Ville

Date de naissance  Âge (années) Taille Centimètre

Mot de passe Protection par mot de passe non configurée

\* = champ obligatoire

Nouveau Sauvegarder Annuler Supprimer le profil

Mon profil

Ajouter un utilisateur

Sexe  Masculin  Féminin Rue

Prénom Jade Créer un mot de passe

Nom Huaux Nouveau mot de passe

Date de naissance 15/02/1999  Âge (années) 0 Confirmation du mot de passe

Mot de passe Protection par mot de passe non configurée

Sauvegarder Annuler



# Sauvegarder votre profil sur votre ordinateur

Mon profil

Ajouter un utilisateur

Sexe  Masculin  Féminin

Rue de Belle Vue

Prénom Jade

Code postal 6250

Nom Huaux


Ville Presles

Date de naissance 15/02/1999    Âge (années) 18

Taille 170 Centimètre

Mot de passe \*\*\*\*\*

\* = champ obligatoire

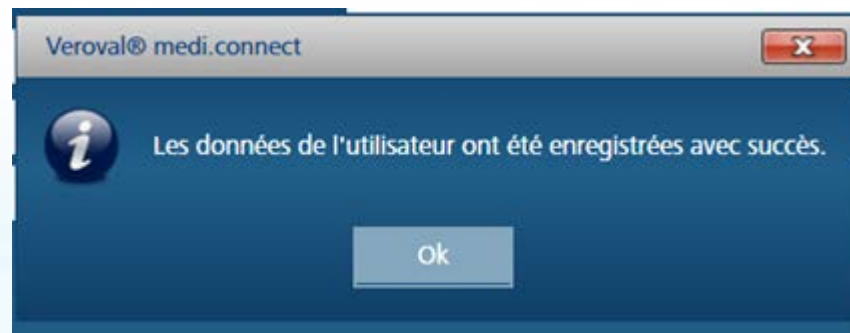


Sauvegarder votre profil en ligne pour consultation sur tablettes, smartphones, autres ordinateurs, pour échanges des données avec votre médecin.



Mon profil

Sexe <sup>\*</sup>  Masculin  Féminin

Prénom <sup>\*</sup> Jade

Nom <sup>\*</sup> Huaux

Date de naissance <sup>\*</sup> 15/02/1999  Âge (années) 18

Mot de passe <sup>\*</sup> \*\*\*\*\*  

Rue de Belle Vue

Code postal 6250

Ville Presles

Taille <sup>\*</sup> 170 Centimètre

<sup>\*</sup> = champ obligatoire

[Nouveau](#) [Sauvegarder](#) [Annuler](#) [Supprimer le profil](#) [S'inscrire sur le site Web de Veroyal® medi.connect](#)

Clic sur nouvel utilisateur, ensuite complétez les champs e-mail et mot de passe, et cliquez sur sauvegarder

S'inscrire sur le site Web de Veroyal® medi.connect

Nouvel utilisateur  
 Utilisateur existant

Continuer Cancel

### Mon profil

Sexe  Masculin  Féminin

Prénom

Nom

Date de naissance   Âge (années)

Mot de passe


E-mail

Mot de passe




Confirm Password

\* = champ obligatoire

Nouveau Sauvegarder Annuler Supprimer le profil



Les fenêtres suivantes vous indiquent que vos données ont été mises en ligne sur un site sécurisé.

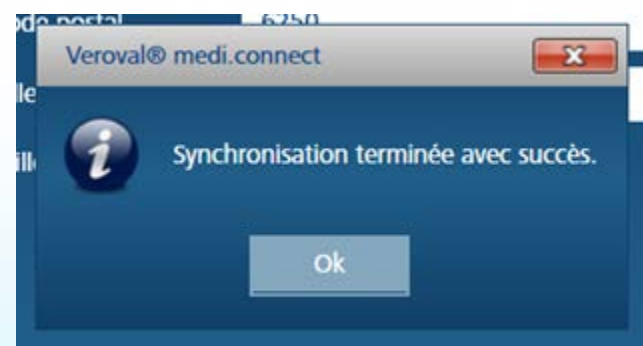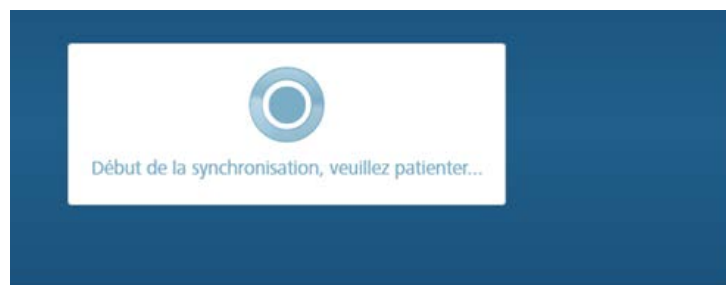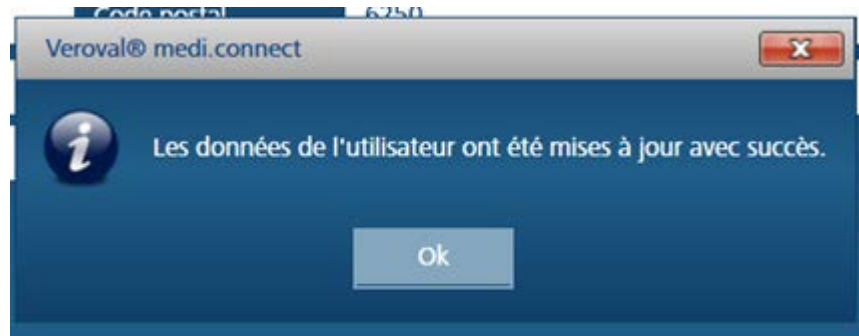

Paramétrez votre système : →réglages, → système

Veroval® medi.connect

Jade Huaux

Vue d'ensemble Pression artérielle ECG Poids température Auto-test Réglages

Mon profil Système

Système

Paramètres du système

Langue Français

Affichage

Date j/MM/aaaa

Heure 24 heures

Mass Métrique

Vérification des mises à jour

Vérification automatique lors du démarrage du programme

Sauvegarder

Restaurer les données

Base de données du système

Sauvegarder... Effectuer une sauvegarde de la base de données complète du système.


Restaurer... Restaurer la base de données du système

Cochez la vérification automatique et sauvegarder.



# Contrôle de votre pression artérielle.

1. Paramétrez votre appareil : → réglages → Pression artérielle

- Modifier les périodes : matin – soirée : ex de 0:00 à 11:59 et de 12:00 à 23:59
- Cochez votre appareil
- Sauvegarder

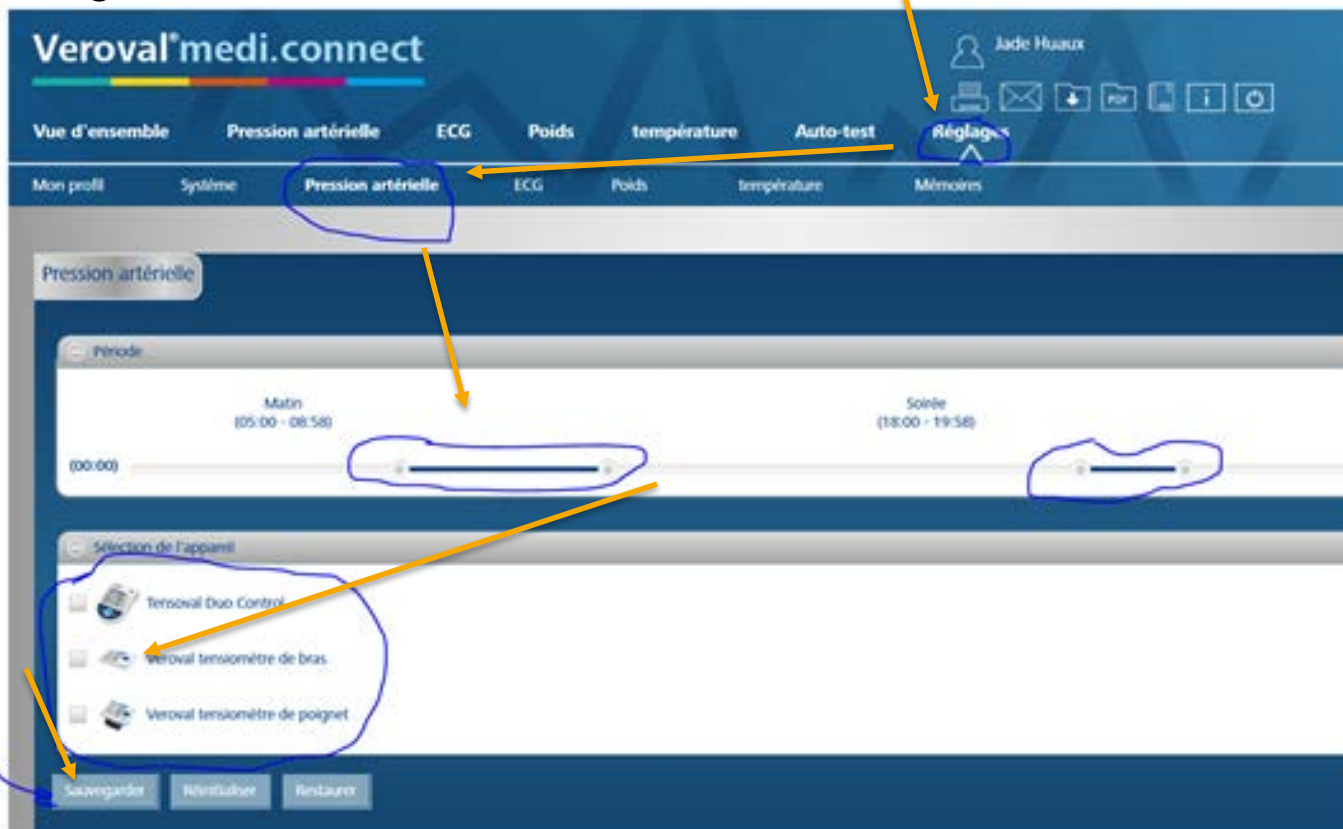

Il est possible que le logiciel vous demande d'installer les pilotes manquants: cliquez sur « installer »

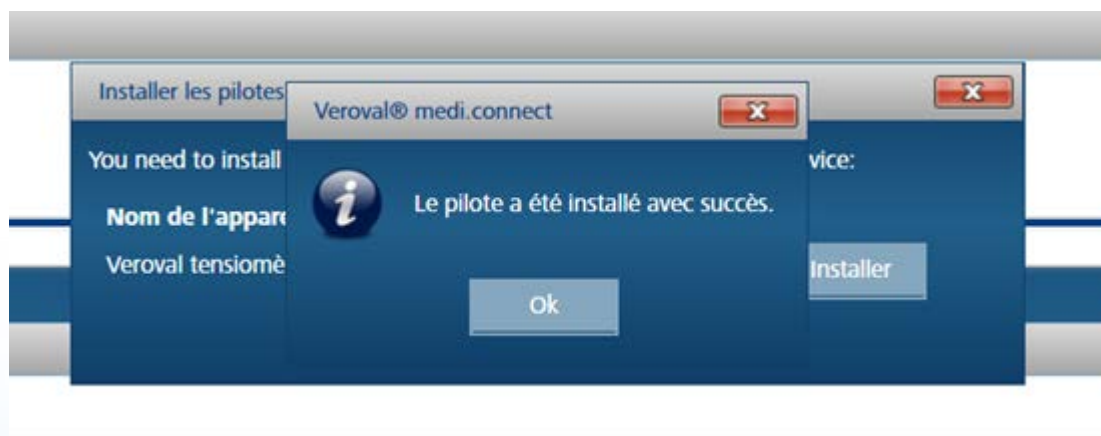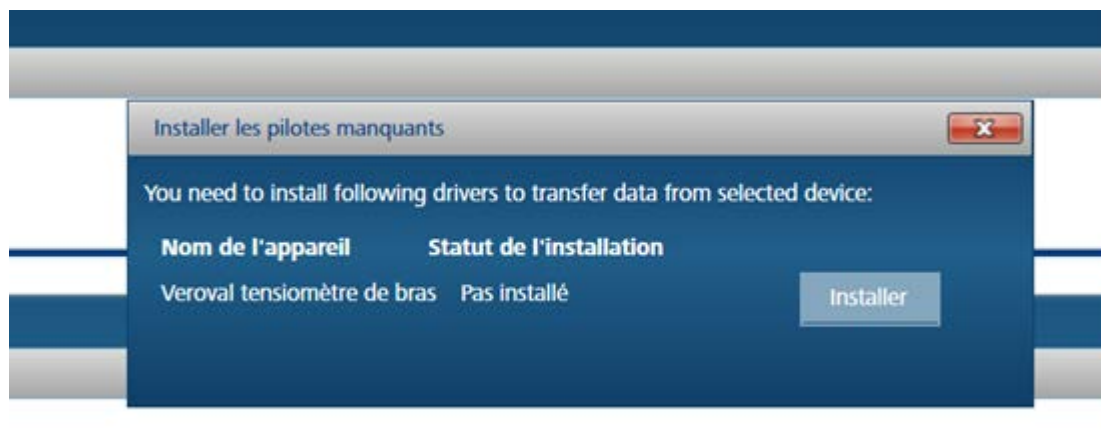




# Télécharger vos mesures de tension artérielle

1. Brancher votre tensiomètre au PC avec le câble USB fourni


2. → Pression artérielle → télécharger

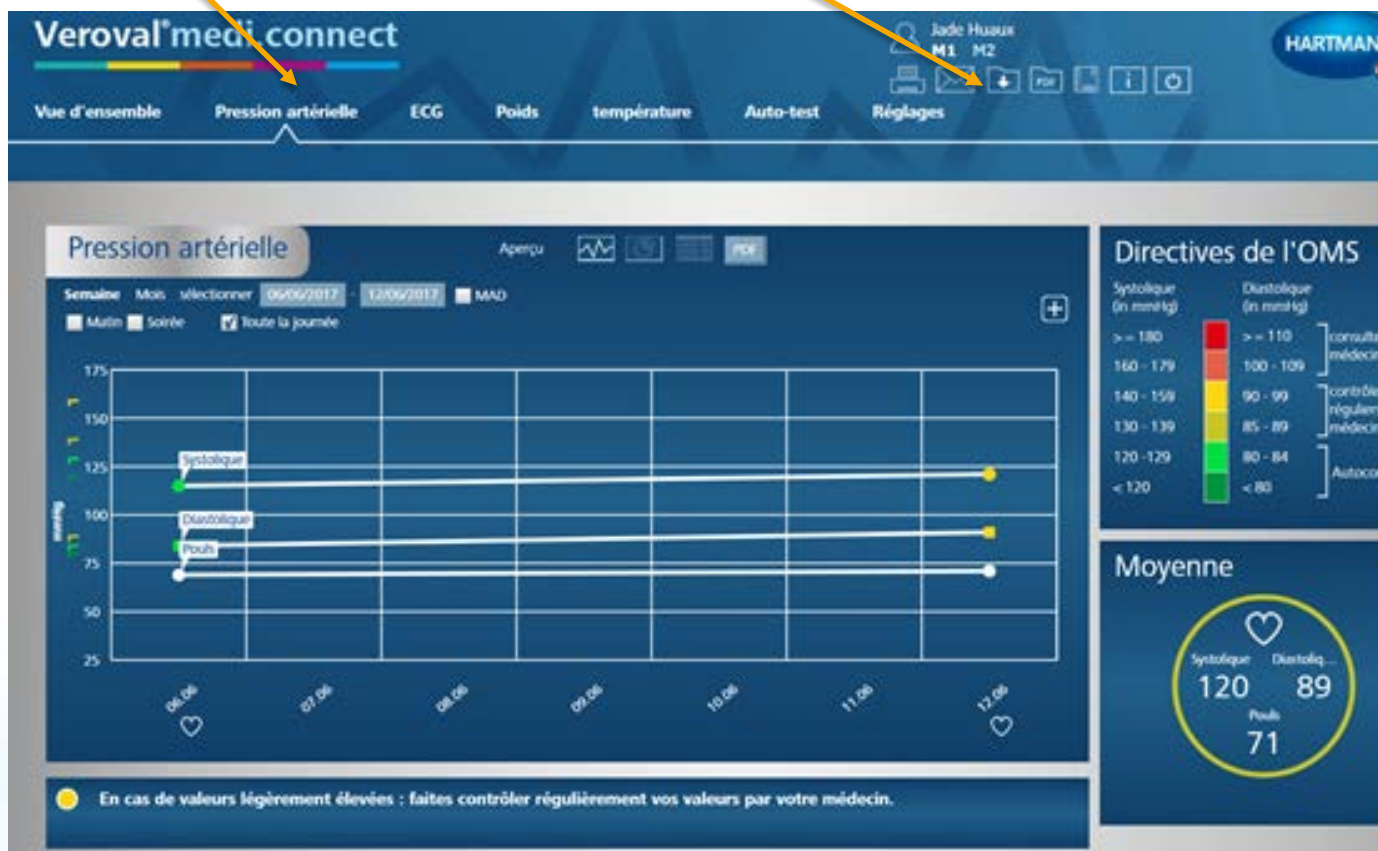




# Télécharger vos mesures de tension artérielle

## 2. Sélectionner votre tensiomètre en cliquant sur l'icône

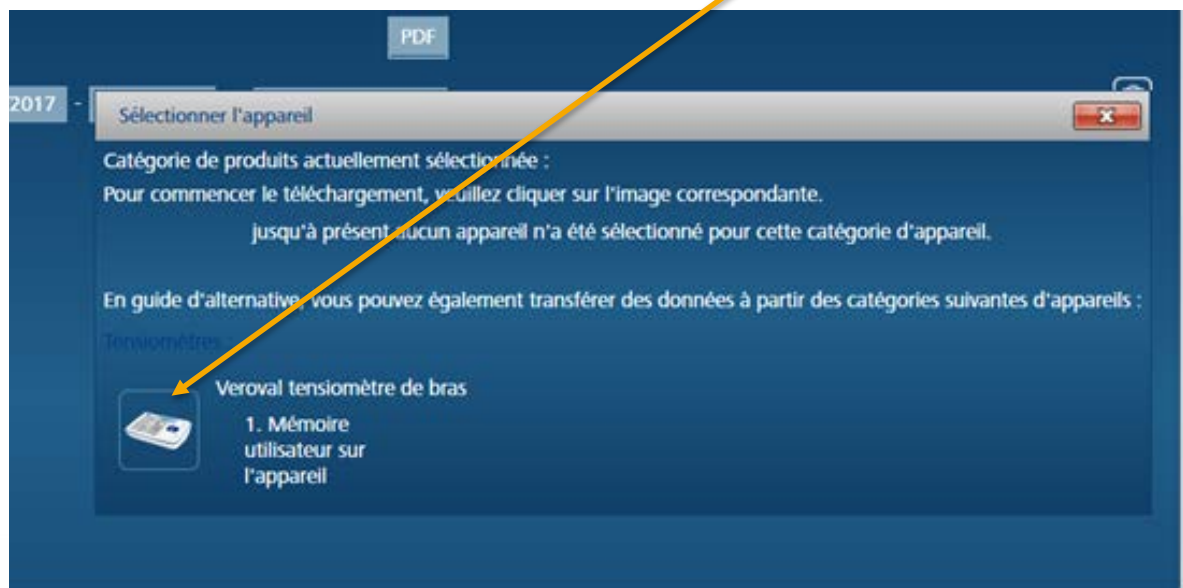


# Télécharger vos mesures de tension artérielle

L'exportation des données se fait :

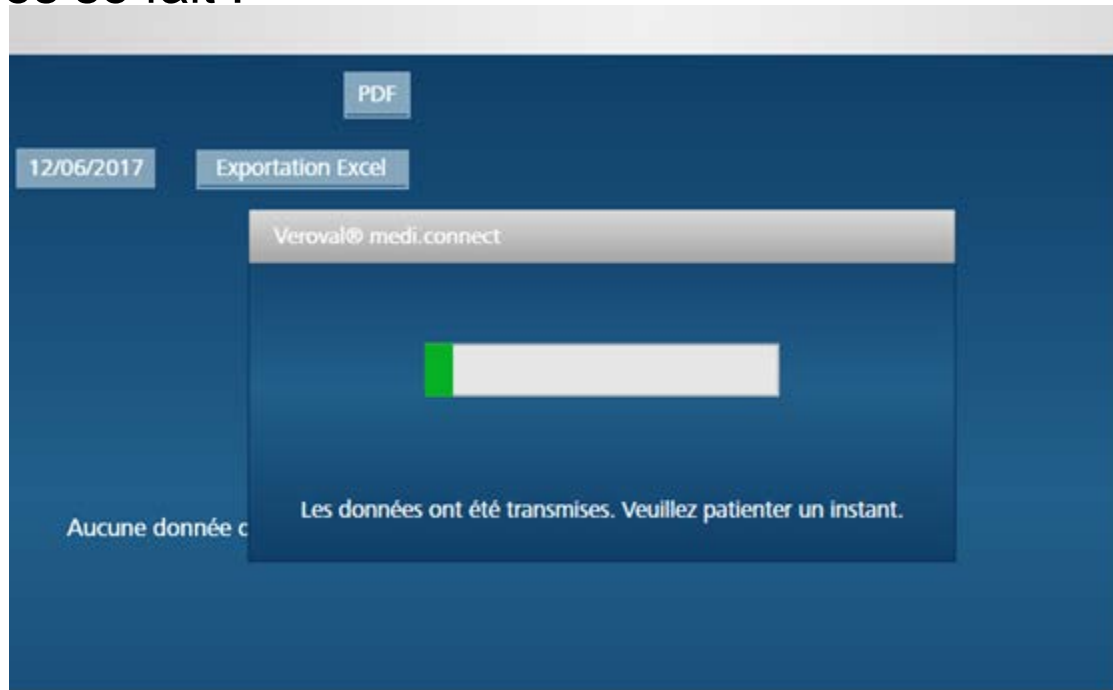


Sauvegarder les données :

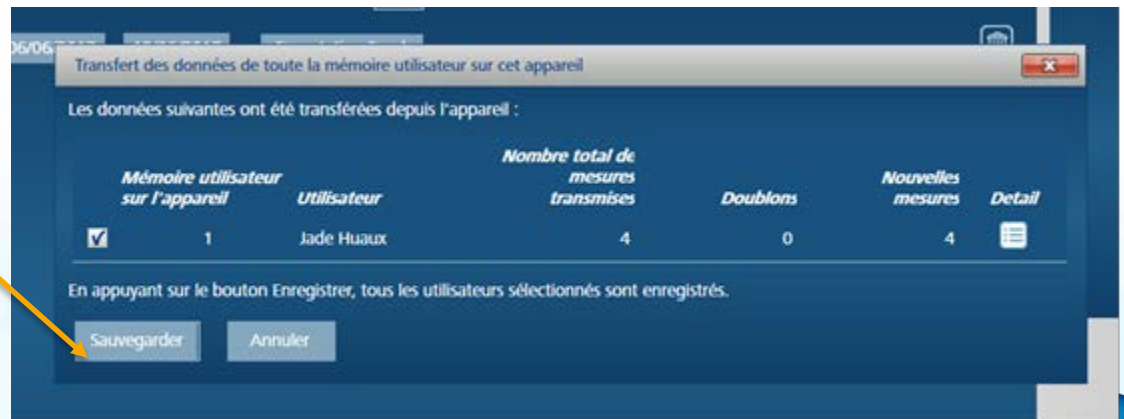


# Télécharger vos mesures de tension artérielle

Ce message vous confirme le succès de l'opération :

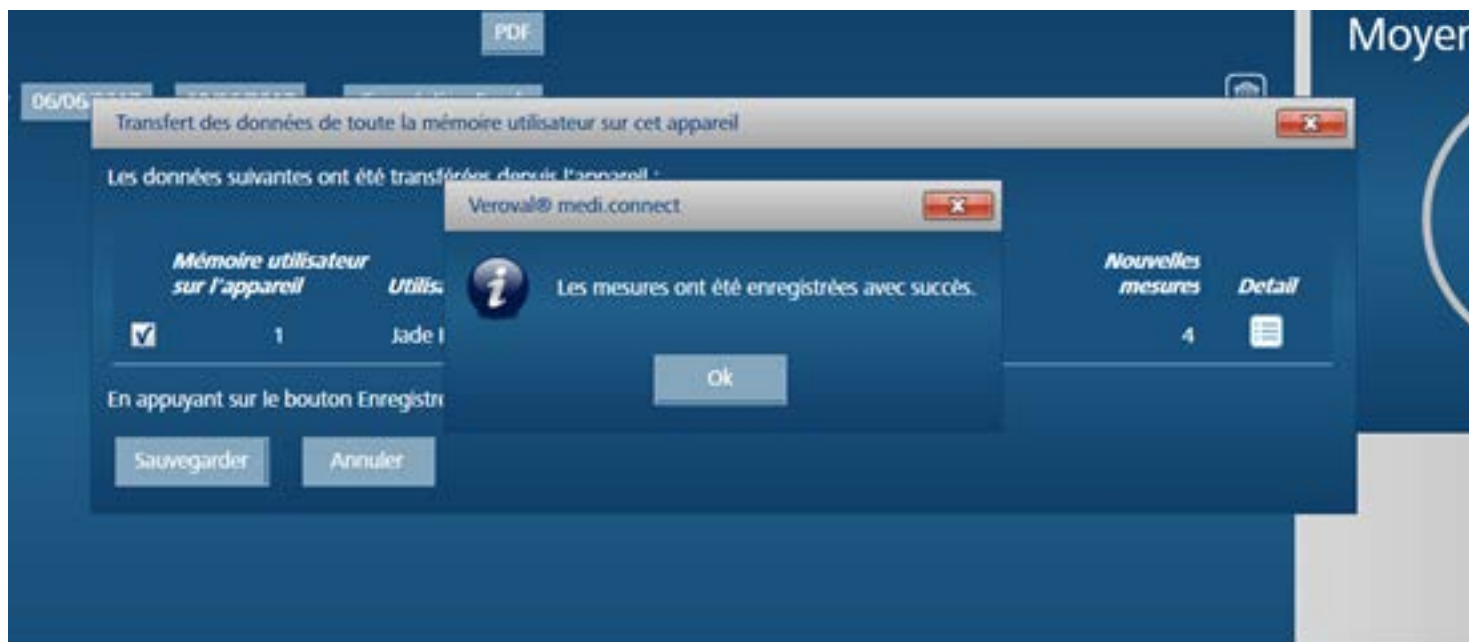

# Visualisation de vos mesures

Vos valeurs de tension artérielle s'affichent sous forme de graphiques, ainsi que vos pulsations cardiaques. Votre moyenne se trouve dans le cadre inférieur droit.

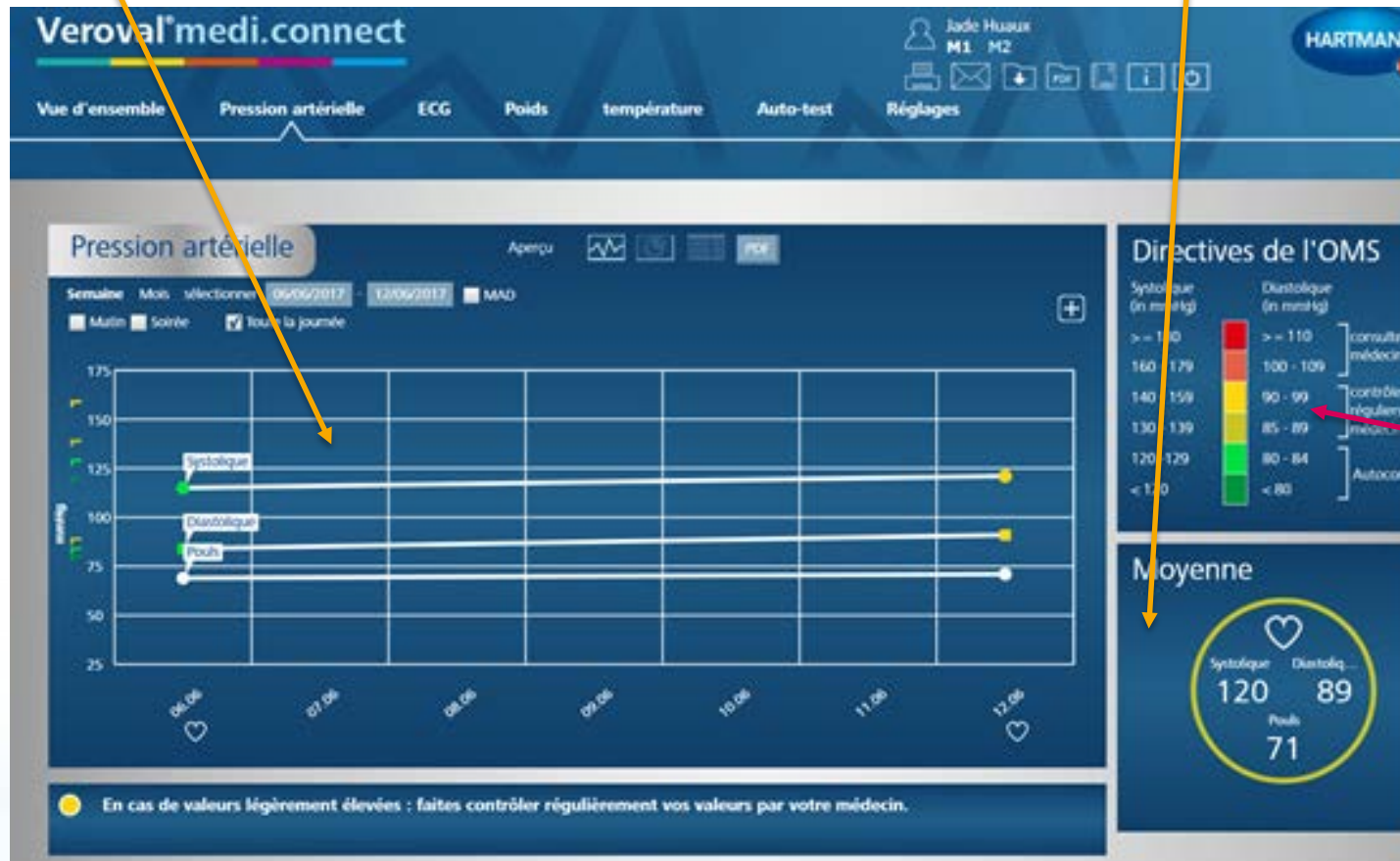

La couleur de vos points de mesures réfèrent à la gradation de l'hypertension.

# Contrôle de votre électrocardiogramme.


1. Paramétrez votre appareil : → réglages → Pression artérielle

- Cochez votre appareil
- Sauvegarder

The screenshot displays the Veroyal® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Stéphane Huaux. The main navigation bar includes options for 'Vue d'ensemble', 'Pression artérielle', 'ECG', 'Poids', 'température', 'Auto-test', and 'Réglages'. The 'Réglages' menu is expanded, showing sub-options: 'Mon profil', 'Système', 'Pression artérielle', 'ECG', 'Poids', 'température', and 'Mémoires'. The 'ECG' sub-option is selected, leading to a 'Sélection de l'appareil' (Device Selection) screen. This screen features a list of devices with checkboxes and a dropdown menu for user memory. The 'Veroyal ECG et tensiomètre' device is checked, and the dropdown is set to '1. Mémoire utilisateur sur l'appareil'. At the bottom of this screen, there are 'Sauvegarder' (Save) and 'Réinitialiser' (Reset) buttons. Three orange arrows highlight the 'Réglages' menu, the 'ECG' sub-option, and the 'Sauvegarder' button.

# Télécharger vos mesures d'ECG.

1. → ECG → Télécharger

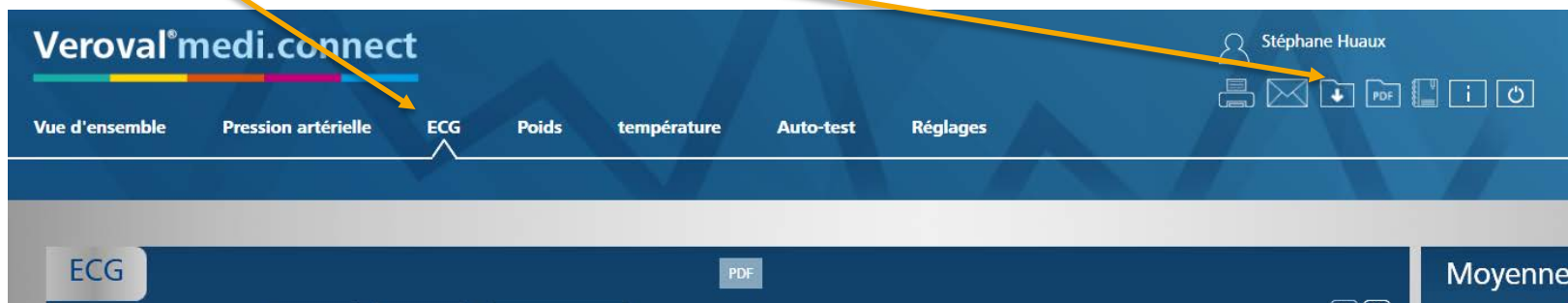


2. En même temps, insérez l'adaptateur Bluetooth fourni dans une entrée USB de votre PC et allumez votre ECG en appuyant sur l'électrode





# Télécharger vos mesures d'ECG.



## 3. Sélectionner votre ECG en cliquant sur l'icône

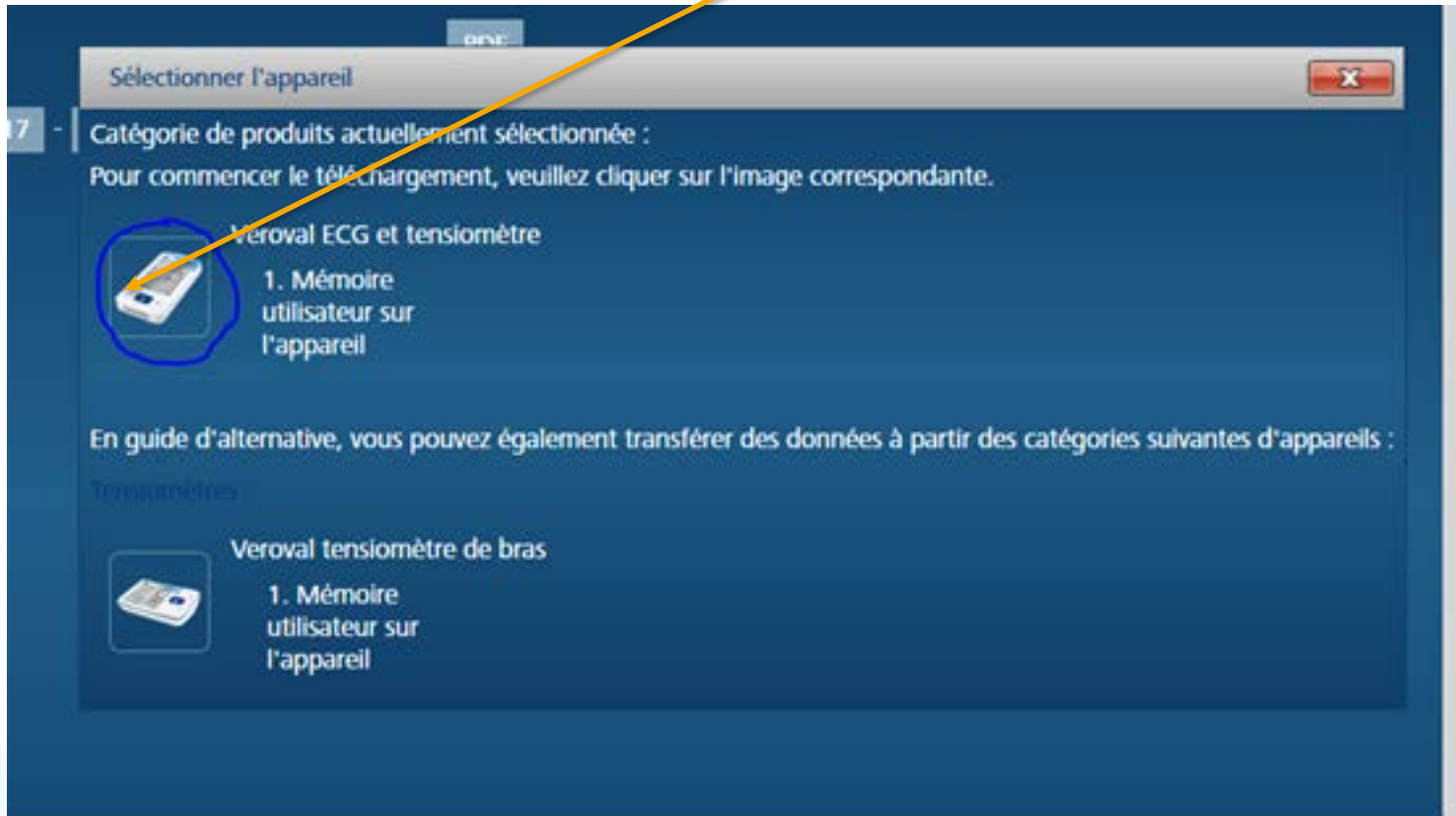

# Télécharger vos mesures d'ECG.

4. Si votre ECG est détecté, il apparaît dans la fenêtre suivante. Cliquez directement sur le logo Bluetooth, en vérifiant que votre ECG est toujours allumé (extinction automatique après 30 sec.)

5. La fenêtre suivante apparaît, cliquez sur télécharger

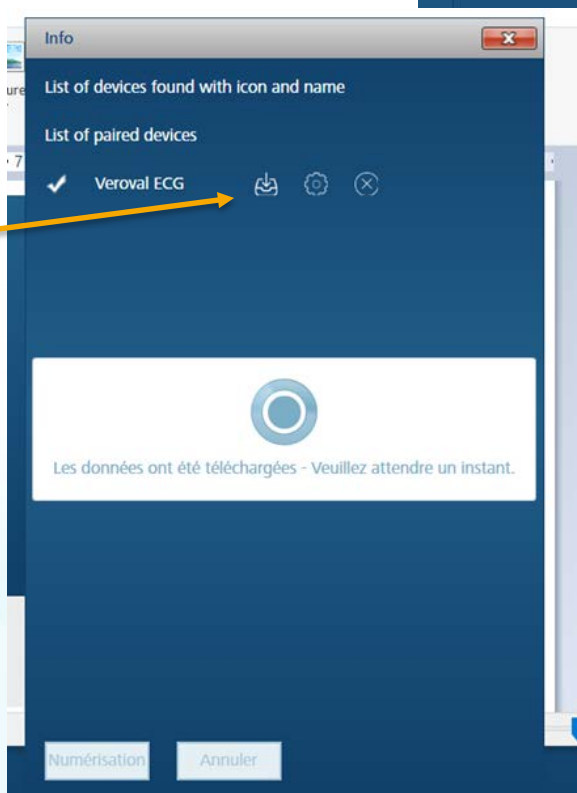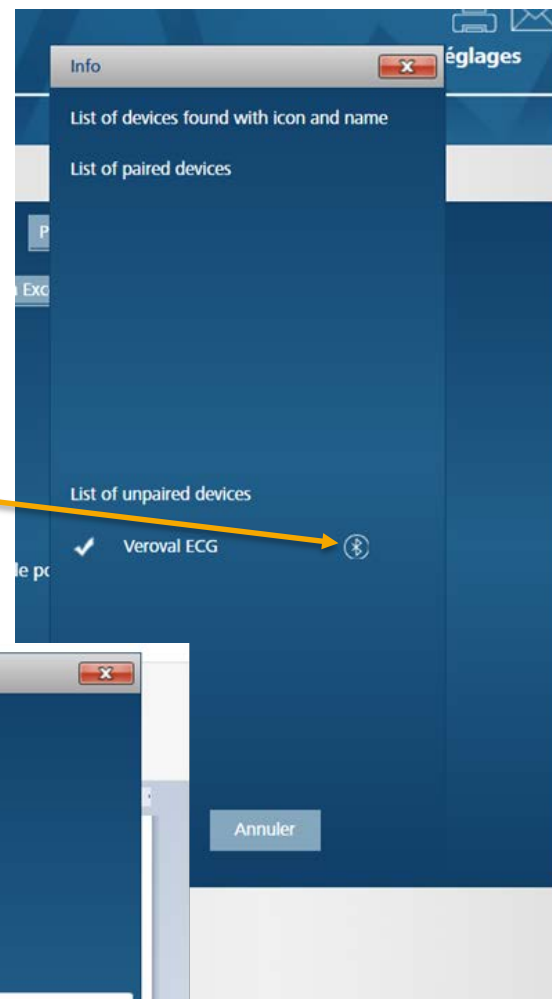



# Télécharger vos mesures d'ECG.

## 6. Sauvegardez les valeurs téléchargées :

Transfert des données de toute la mémoire utilisateur sur cet appareil

Les données suivantes ont été transférées depuis l'appareil : *ECG*

Mémoire utilisateur sur l'appareil	Utilisateur	Nombre total de mesures transmises	Doublons	Nouvelles mesures	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Jade Huaux	35	0	35	

En appuyant sur le bouton Enregistrer, tous les utilisateurs sélectionnés sont enregistrés.

**Sauvegarder** Annuler

Les données suivantes ont été transférées depuis l'appareil : *Pression artérielle*

Mémoire utilisateur sur l'appareil	Utilisateur	Nombre total de mesures transmises	Doublons	Nouvelles mesures	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Jade Huaux	6	0	6	

En appuyant sur le bouton Enregistrer, tous les utilisateurs sélectionnés sont enregistrés.

**Sauvegarder** Annuler

# Affichage de votre électrocardiogramme

7. Un tableau reprend le résumé des différentes mesures,



8. En cliquant sur « > », vous visualisez le tracé ECG correspondant



# Téléchargez vos mesures

Dans le cas où vous ne parvenez pas à détecter votre ECG avec le stick USB Bluetooth fourni, fermez le programme Veroval®medi.connect et relancez-le ensuite. Vérifiez que votre ECG est bien coché dans l'étape 1 (page 21)

Avant de cliquer sur l'icône (étape 3 p.23), insérez votre USB et allumez l'ECG.

# Télécharger l'analyse de votre poids et de votre composition corporelle

1. Paramétrez votre appareil : → réglages → Poids

- Cochez votre appareil – sélectionner la mémoire voulue
- Sauvegardez

The screenshot displays the 'Veroval® medi.connect' web application interface. At the top, the user is identified as 'Stéphane Huaux'. The main navigation bar includes 'Vue d'ensemble', 'Pression artérielle', 'ECG', 'Poids', 'température', 'Auto-test', and 'Réglages'. The 'Poids' section is active, showing a secondary navigation bar with 'Mon profil', 'Système', 'Pression artérielle', 'ECG', 'Poids', 'température', and 'Mémoires'. The 'Poids' settings page features a 'Sélection de l'appareil' section with a checked box for 'Veroval scale' and a 'Select User memory' dropdown menu. At the bottom of this section are 'Sauvegarder' and 'Réinitialiser' buttons. Three yellow arrows point from the text above to the 'Réglages' menu item, the 'Poids' menu item, and the 'Veroval scale' checkbox.


# Télécharger vos mesures de composition corporelle et de poids

1. Cliquez sur Poids et ensuite sur télécharger

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is visible. Below it, a navigation bar contains several menu items: 'Vue d'ensemble', 'Pression artérielle', 'ECG', 'Poids', 'température', 'Auto-test', and 'Régages'. The 'Poids' item is highlighted with a white underline. In the top right corner, the user's name 'Stéphane Huaux' is displayed next to a profile icon. Below the name, there are several utility icons: a printer, an envelope, a download arrow, a PDF icon, and a document icon. Two yellow arrows originate from the text above: one points to the 'Poids' menu item, and the other points to the download arrow icon. Below the navigation bar, the 'Poids' section is active, showing a sub-header 'Poids' and a date range selector 'Semaine Mois sélectionner 06/06/2017 - 12/06/2017'. To the right of the date range, there are three radio buttons for unit selection: 'BF%', '≈%', and 'o-o%'. Further right, there are icons for 'Aperçu' (a line graph), a list view, and a 'PDF' button. A plus sign icon is located in the bottom right corner of this section.



# Télécharger vos mesures de composition corporelle et de poids

## 2. Cochez l'icône de votre balance

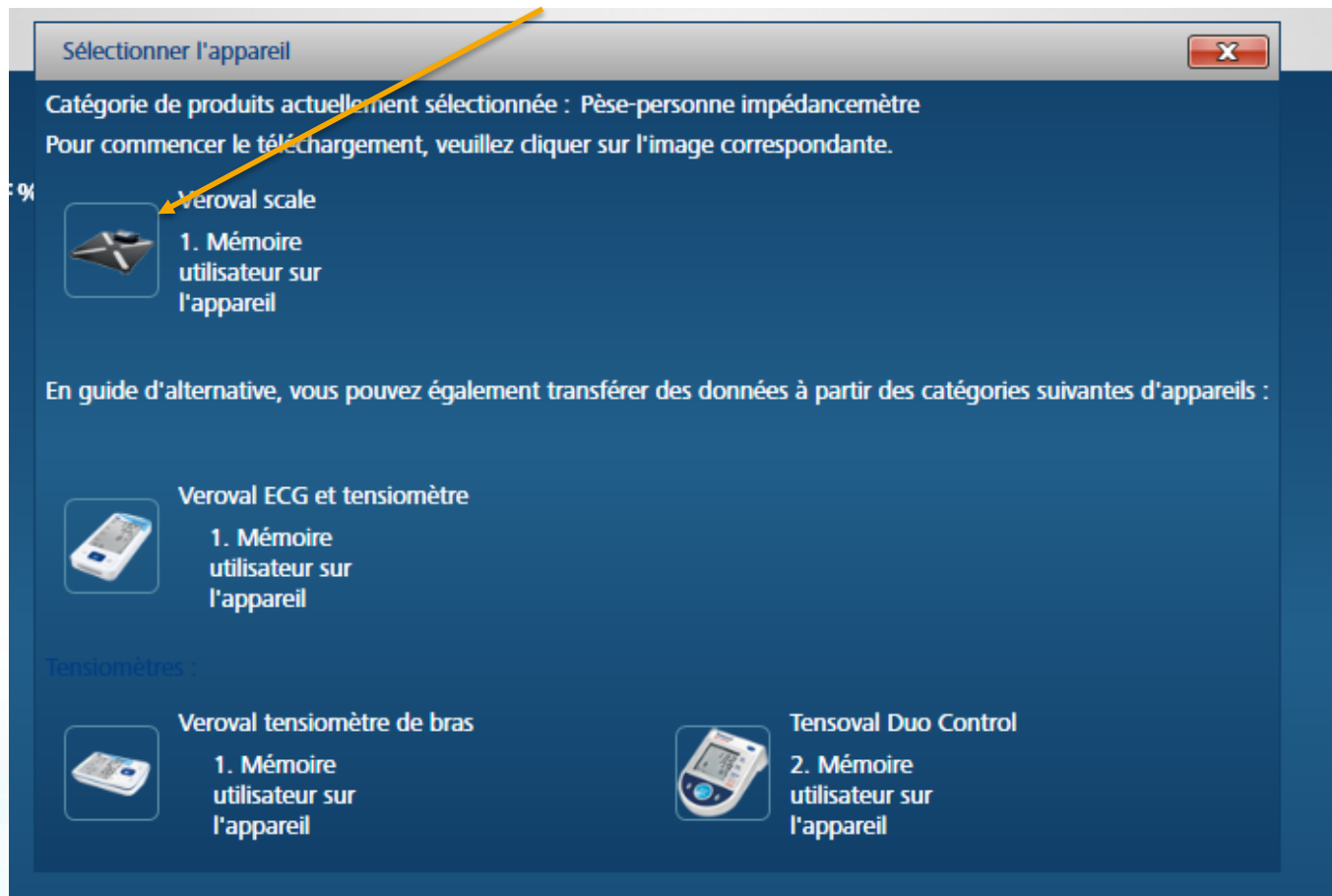


# Télécharger vos mesures de composition corporelle et de poids

3. Au message suivant, connectez votre unité de contrôle amovible à votre PC à l'aide du câble USB fourni. Ensuite répondez par l'affirmative

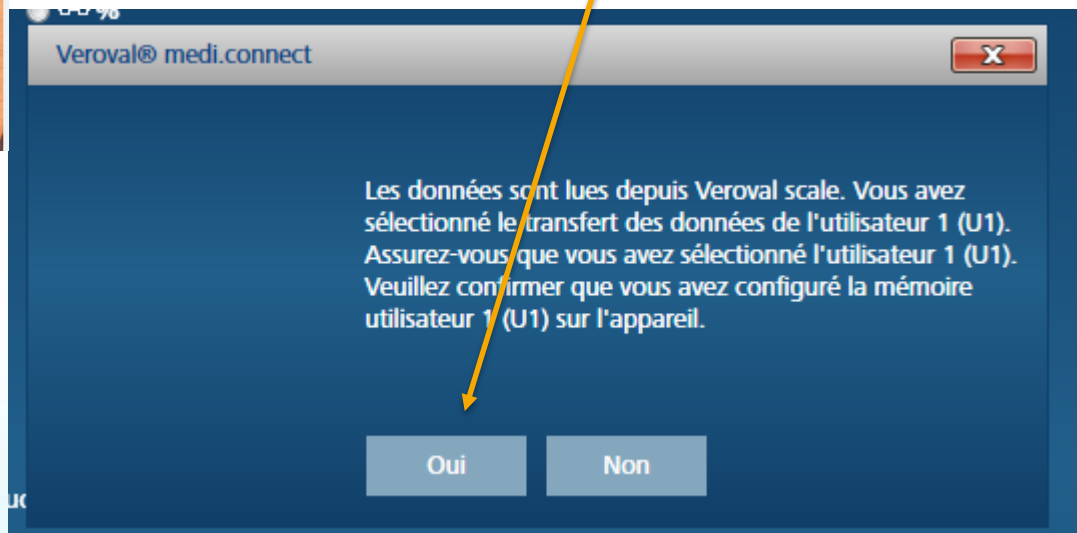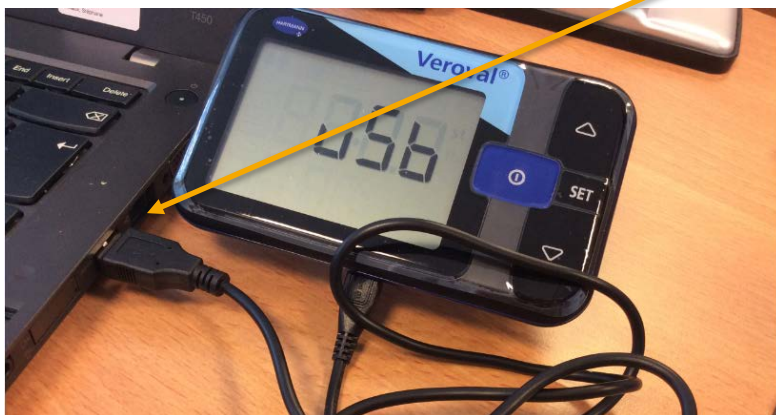

# Télécharger vos mesures de composition corporelle et de poids

## 4. Vos valeurs sont téléchargées

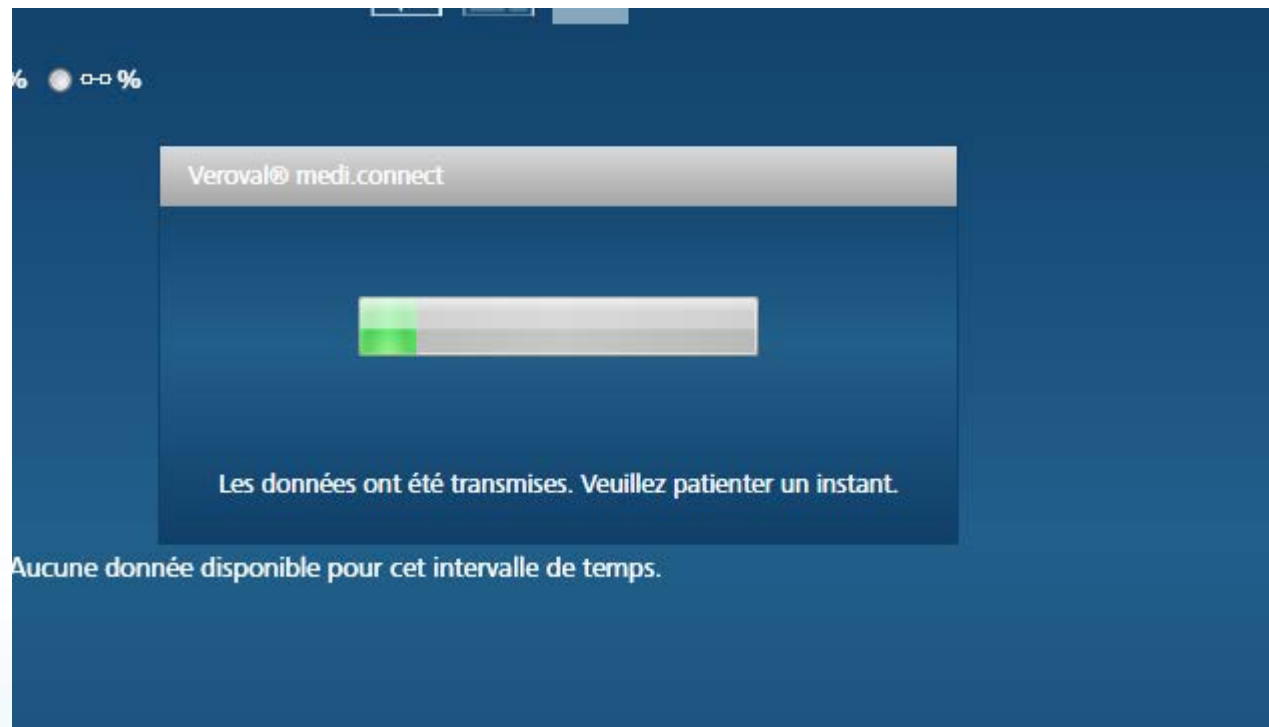



# Télécharger vos mesures de composition corporelle et de poids

## 5. Sauvegardez vos mesures

017 BF %

Transfert des données de toute la mémoire utilisateur sur cet appareil

Les données suivantes ont été transférées depuis l'appareil :

Mémoire utilisateur sur l'appareil	Utilisateur	Nombre total de mesures transmises	Doublons	Nouvelles mesures	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	Stéphane Huaux	1	0	1	

En appuyant sur le bouton Enregistrer, tous les utilisateurs sélectionnés sont enregistrés.

Sauvegarder Annuler


Veroval® medi.connect

Les mesures ont été enregistrées avec succès.

Ok

# Affichage de vos mesures de poids et composition corporelle

6. Vos mesures apparaissent sous forme de graphique, le poids en premier, le taux de masse grasse en second.

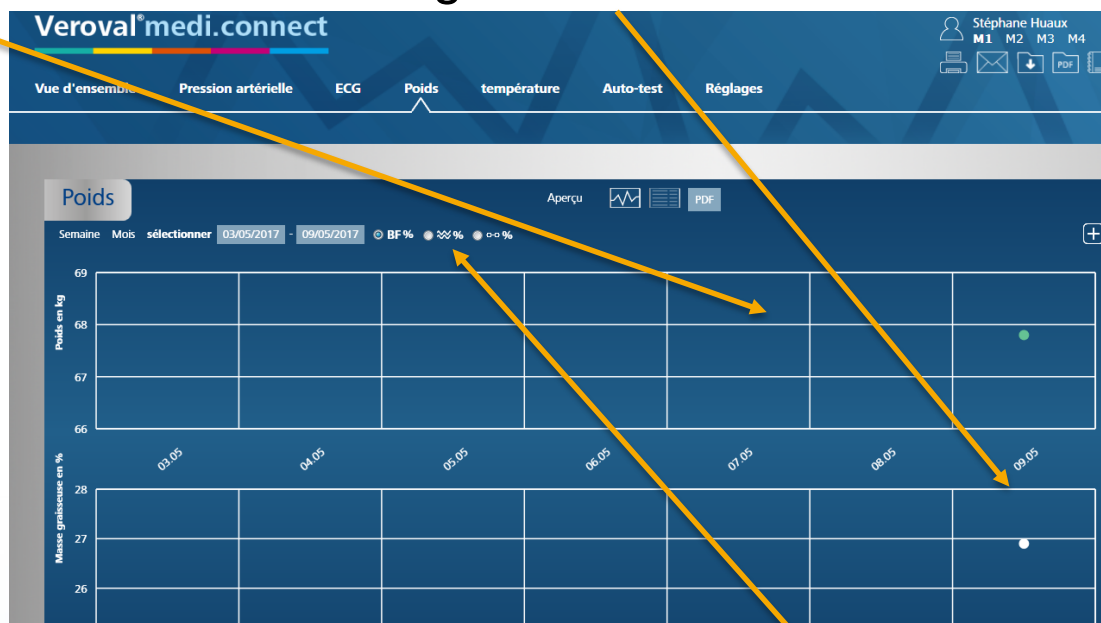

7. En cliquant sur les symboles suivantes vous visualisez votre taux de masse hydrique ou de masse musculaire

# Affichage de vos mesures de poids et composition corporelle

8. Votre indice de masse corporelle (IMC – BMI) se retrouve dans la couleur de votre mesure et dans votre moyenne



# Synchronisation de vos mesures en ligne - login

1. Lorsque vous avez transféré vos mesures sur votre ordinateur, vous pouvez les mettre en ligne de manière sécurisée afin de pouvoir les consulter à partir de n'importe quel autre ordinateur, tablette ou smartphone. (voir étape page 10)
2. Dans Réglages → Mon profil, cliquez sur « Démarrez la synchronisation »

Veroval® medi.connect

Stéphane Huaux

Vue d'ensemble Pression artérielle ECG Poids température Auto-test Réglages

Mon profil Système Pression artérielle ECG Poids température Mémoires

Mon profil

Sexe  Masculin  Féminin

Rue de Belle Vue 16

Prénom Stéphane Code postal 6250

Nom Huaux Ville Presles

Date de naissance 12/07/1969 Âge (années) 47 Taille 179 Centimètre


Mot de passe \*\*\*\*\*

\* = champ obligatoire


Nouveau Sauvegarder Annuler Supprimer le profil Démarrez la synchronisation

# Synchronisation de vos mesures en ligne - login

3. Une fenêtre affiche l'état d'avancement de votre synchronisation et le message suivant vous indique la réussite de l'opération.

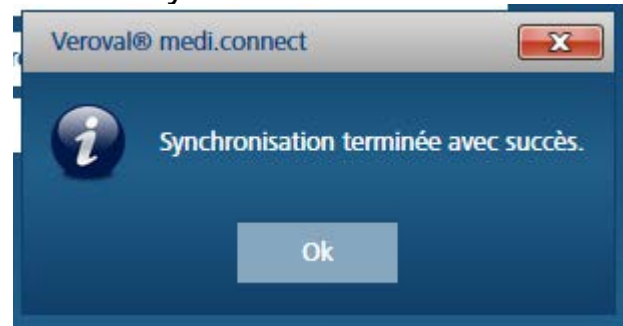

4. Vous pouvez dès à présent consulter vos mesures en ligne à partir de votre tablette ou smartphone en vous rendant sur <https://veroval-mediconnect.info/> . Sélectionnez la langue de votre choix et complétez votre e-mail et votre mot de passe. Cliquez sur « login ».

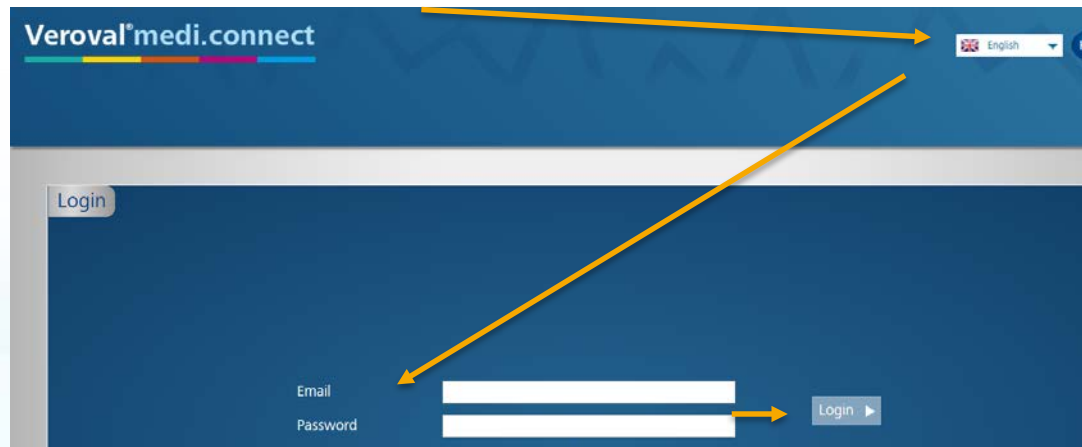

# Partage de vos mesures


1. Si vous désirez partager vos mesures avec des membres du corps médical ou de votre famille, différents choix s'offrent à vous. Visualisation en ligne (voir page 36), impression de vos mesures, ou envoi par e-mail (page 41).
2. Pour imprimer ou envoyer vos mesures, vous avez le choix entre l'analyse complète de vos données ou l'analyse partielle : sur « Vue d'ensemble », sélectionnez la période désirée, et cliquez sur l'icône « imprimante » :



# Partage de vos mesures

3. Dans la fenêtre suivante, vous choisissez les valeurs que vous désirez imprimer, par exemple, si vous voulez tout imprimer, vous laissez tous les onglets cochés, si vous désirez uniquement votre pression artérielle, vous décochez les autres mesures.

4. Cliquez sur « Aperçu »

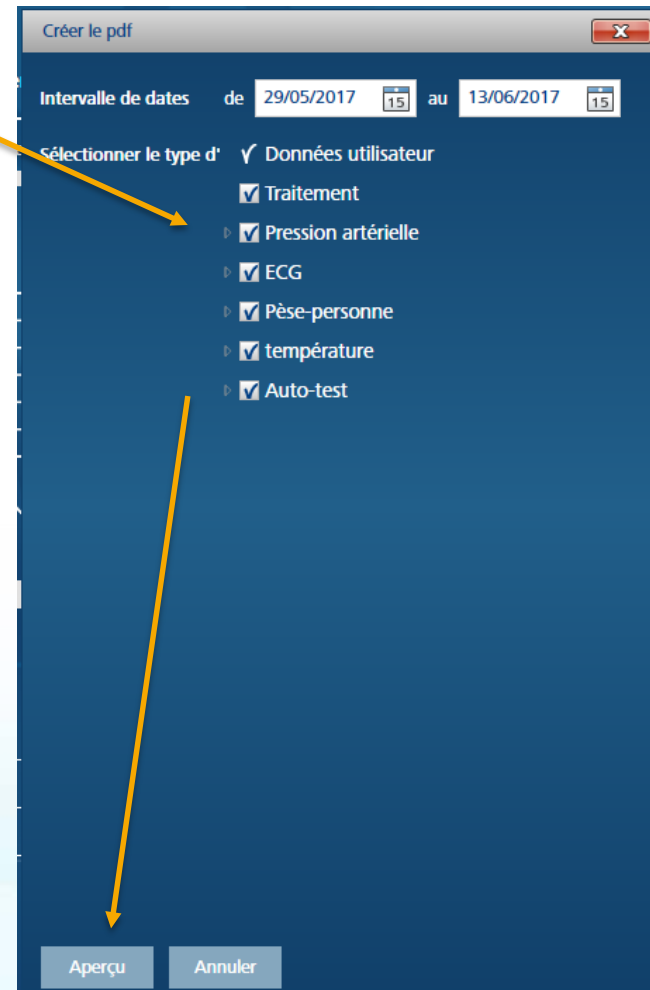

# Partage de vos mesures

5. Un aperçu de l'impression apparaît à l'écran, cliquez sur « Imprimer », choisissez votre imprimante et lancez l'impression.

The screenshot shows a software window titled "Aperçu d'impression" (Print Preview). At the top, there are two buttons: "Imprimer" (Print) and "Fermer" (Close). The main content area displays patient information and a treatment status.

**Aperçu des mesures de la pression artérielle : 29/05/2017 - 13/06/2017**

Sexe	Masculin	Rue	de Belle Vue 16
Prénom	Stéphane	Code postal	6250
Nom	Huaux	Ville	Presles
Date de naissance	12/07/1969	Âge (années)	47
		Taille	179
		Services en ligne	

**Traitement**  
Il n'y a pas de données disponibles.

The "Print" dialog box is open, showing the "General" tab. The "Select Printer" list includes:

- BE-SAI-NP1003\_PS on BE-SAI-PRT01
- BE-SAI-NP1004 on BE-SAI-PRT01
- Brother MFC-990CW

Other options in the list include Fax, Microsoft XPS Document Writer, and Send To OneNote 2013. The selected printer is "BE-SAI-NP1003\_PS on BE-SAI-PRT01".

Additional settings in the dialog include:


- Status: Ready
- Location: Common 2<sup>e</sup> floor
- Comment: iR-AD 9200 PS
- Page Range: All (selected)
- Number of copies: 1
- Collate: checked

Buttons at the bottom of the dialog are "Print", "Cancel", and "Apply".



# Partage de vos mesures – e-mail

Pour envoyer vos mesures par email, nous vous recommandons de créer un PDF, de le sauvegarder et de le joindre en annexe à votre mail.

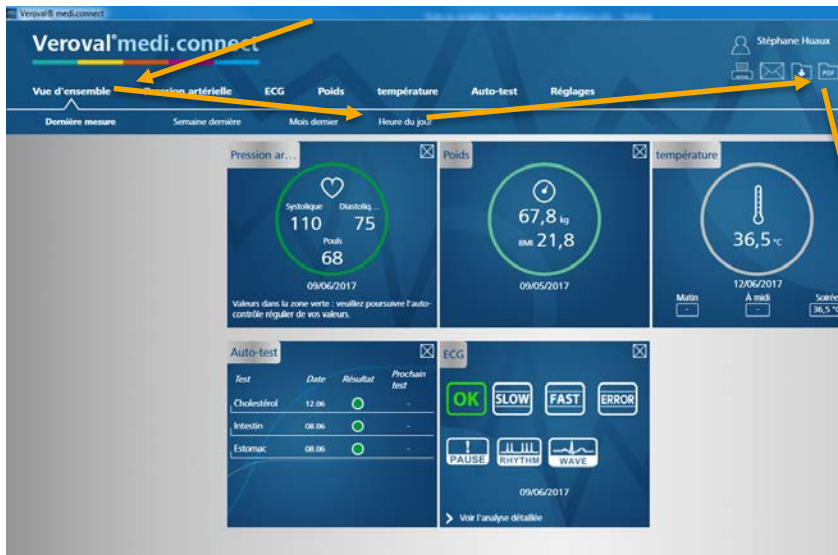

Créer le pdf

Intervalle de dates de 29/05/2017 au 13/06/2017

Sélectionner le type de données

- Données utilisateur
- Traitement
- Pression artérielle
- ECG
- Pèse-personne
- température
- Auto-test

Aperçu Annuler

PDF

PDF Fermer

Aperçu des mesures de la pression artérielle : 29/05/2017 - 13/06/2017


Sexe	Masculin	Rue	de Belle Vue 16
Prénom	Stéphane	Code postal	6250
Nom	Haasx	Ville	Drexles
Date de naissance	12/07/1969	Âge (années)	47
		Taille	179
		Services en ligne	

Traitement

Il n'y a pas de données disponibles.

# Partage de vos mesures – e-mail

Choisissez le dossier dans lequel vous désirez enregistrer votre document et cliquez sur « save ».

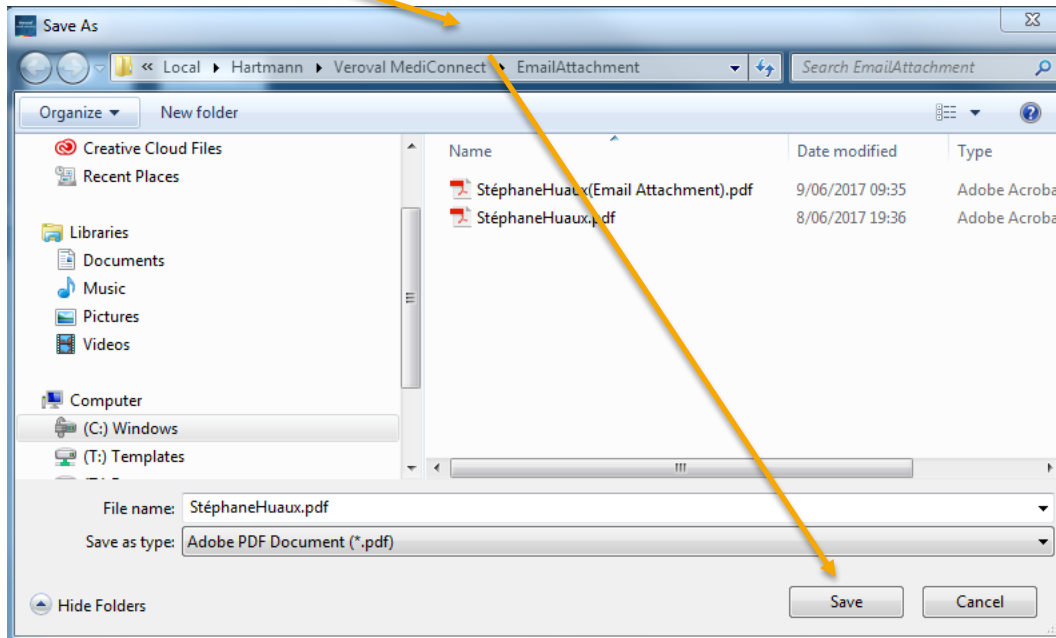

A partir de votre messagerie, il vous reste à joindre ce fichier à votre e-mail.

# Introduction manuelle de vos paramètres de santé

Il vous est possible d'introduire manuellement certains paramètres médicaux, par exemple votre température, votre taux de cholestérol, le résultat de test d'autodiagnostic.

Par exemple, lors de votre consultation médicale, votre médecin a pris votre tension et vous a donné le résultat de votre prise de sang. Vous désirez les intégrer à vos mesures, voici comment faire :

\* dans l'onglet « Pression artérielle », cliquez sur l'icône



Veroval® medi.connect

Stéphane Huaux

Vue d'ensemble Pression artérielle ECG Poids température Auto-test Réglages

Pression artérielle Aperçu

Semaine Mois sélectionner 29/05/2017 - 13/06/2017 MAD

Matin Soirée  Toute la journée

# Introduction manuelle de vos paramètres de santé

Dans la fenêtre suivante, introduisez les données demandées et sauvegardez. Vous pouvez joindre un commentaire et même le traitement médical que vous avez reçu.

Ajouter les valeurs

Date \*

Heure \*

Systolique mmHg \*

Diastolique mmHg \*

Pouls / min. \*

Rythme cardiaque trouble

ajouté manuellement

Enregistrer l'analyse

Traitement / commentaire

[Sélectionner le traitement](#)

Sauvegarder Annuler

Ceci est valable dans chaque onglet. Vous pouvez également introduire ces informations à partir de votre journal.



# Introduction manuelle de vos paramètres de santé

Cliquez sur



Complétez les informations voulues et sauvegardez.

Ajouter les valeurs

Catégorie

- Pression artérielle
- Poids
- température
- Cholestrole
- Intestine
- Stomach

Prise de médicaments

Date: 15

Heure: 00 : 00

Médication

Sauvegarder

# Thank you

Si vous avez d'autres questions, merci de nous contacter par e-mail à l'adresse suivante :

[autodiagnostic.phbe@hartmann.info](mailto:autodiagnostic.phbe@hartmann.info)



Going further  
for health