

Veroval®



Veroval®



V tomto krátkom videonávode vám vysvetlíme,
ako jednoducho prenesiete údaje z vášho Veroval® tlakomera...

Veroval®



... do Veroval® Medi.connect softvéru.

Veroval®



Otvorte si Veroval® Medi.connect na vašom počítači,...

Veroval®



... prejdite na „Nastavenie“.

veroval.med.connect

Prehľad **Krvný tlak** EKG Hmotnosť Teplota Domáci test Aktivita

Môj profil Systém Krvný tlak EKG Hmotnosť Aktivita Teplota

Môj profil


Pohlavie *	<input checked="" type="radio"/> Muž <input type="radio"/> Žena	Ulica	Štefánikova 1
Meno *	Juraj	PSČ	81106
Priezvisko *	Kováč	Mesto	Bratislava

Následne v riadku nižšie na „Krvný tlak“.

The screenshot shows the 'Veroval® medi.connect' web application interface. At the top, the user is identified as 'Juraj Kováč' with a profile icon. The HARTMANN logo is in the top right corner. A navigation menu includes 'Prehľad', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Teplota', 'Domáci test', 'Aktivita', and 'Nastavenia'. Below this, a secondary menu shows 'Mój profil', 'Systém', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Aktivita', 'Teplota', and 'Pripomienka'. The main content area is titled 'Krvný tlak' and contains two sections: 'Časové intervaly' and 'Výber prístroja'. The 'Časové intervaly' section features a timeline from 00:00 to 23:59 with two active measurement periods: 'ráno (05:00 - 08:59)' and 'večer (18:00 - 19:59)'. The 'Výber prístroja' section lists three device options: 'Tensoval Duo Control', 'Veroval ramenný tlakomer', and 'Veroval zápästný tlakomer'. At the bottom of the settings area are three buttons: 'Uložiť', 'Obnoviť', and 'Obnoviť'.

Na stránke nastavenia „Krvný tlak“ kliknite...


Veroval®

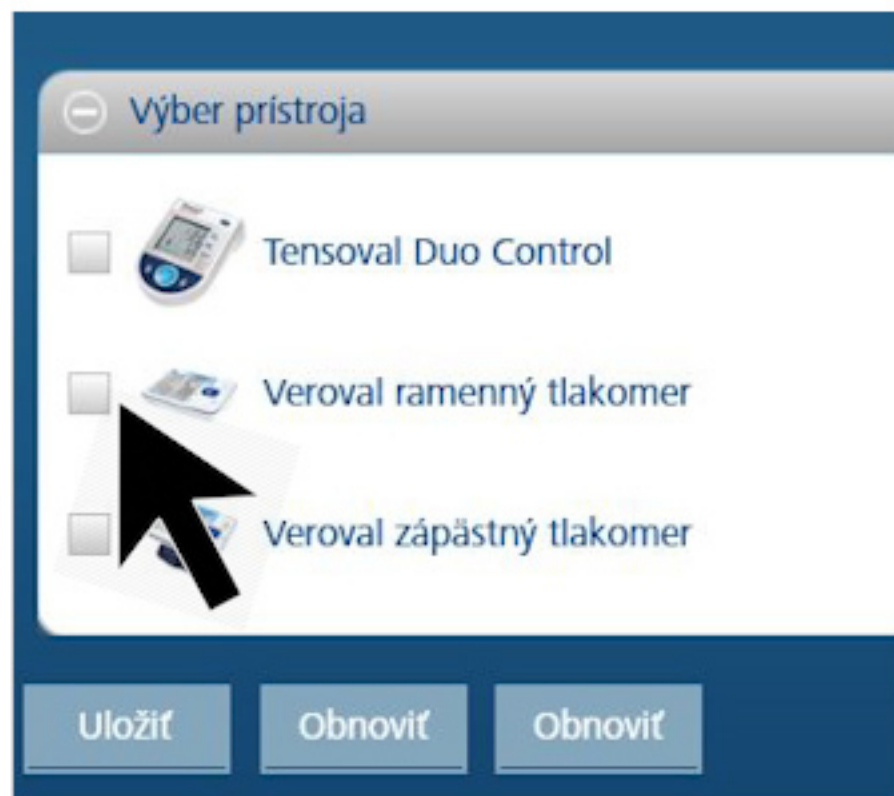



... na požadovaný tlakomer.

Veroval®

☰ Vyber prístroja

 Tensoval Duo Control

 Veroval ramenný tlakomer Zvoľte pamäť používateľa ▾

 Veroval zápästný tlakomer

1. Pamäť uložená v prístroji

2. Pamäť uložená v prístroji


Uložiť Obnoviť Obnoviť

Vyberte užívateľa a uložte.
Tento krok stačí vykonať iba raz.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the logo 'Veroval® medi.connect' is shown with a colorful horizontal bar. Below the logo is a navigation menu with the following items: 'Prehľad', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Teplota', 'Domáci test', 'Aktivita', and 'Nastavenia'. A second row of menu items includes 'Môj profil', 'Sys', 'Krvný tlak', 'EKG', 'Hmotnosť', 'Aktivita', 'Teplota', and 'Pripomienka'. A black mouse cursor is pointing at the 'Krvný tlak' item in the second row. Below the navigation menu, a section titled 'Krvný tlak' is visible, containing a sub-section 'Časové intervaly' (Time intervals) with a minus sign icon. This section shows two time intervals: 'ráno (05:00 - 08:59)' and 'večer (18:00 - 19:59)'. A horizontal timeline below these intervals shows a blue bar indicating the active time range, starting from '(00:00)' and ending at the 'večer' interval.


Na prenesenie údajov kliknite na „Krvný tlak“ v hornej časti registra.

Veroval®

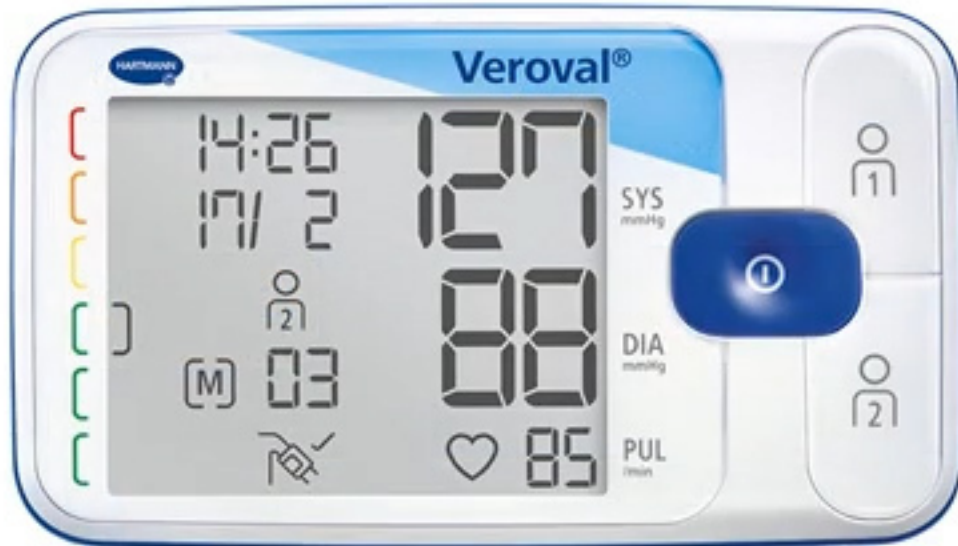


Zasuňte užší koniec USB kábla do otvoru na zadnej strane vášho tlakomera...

Veroval®

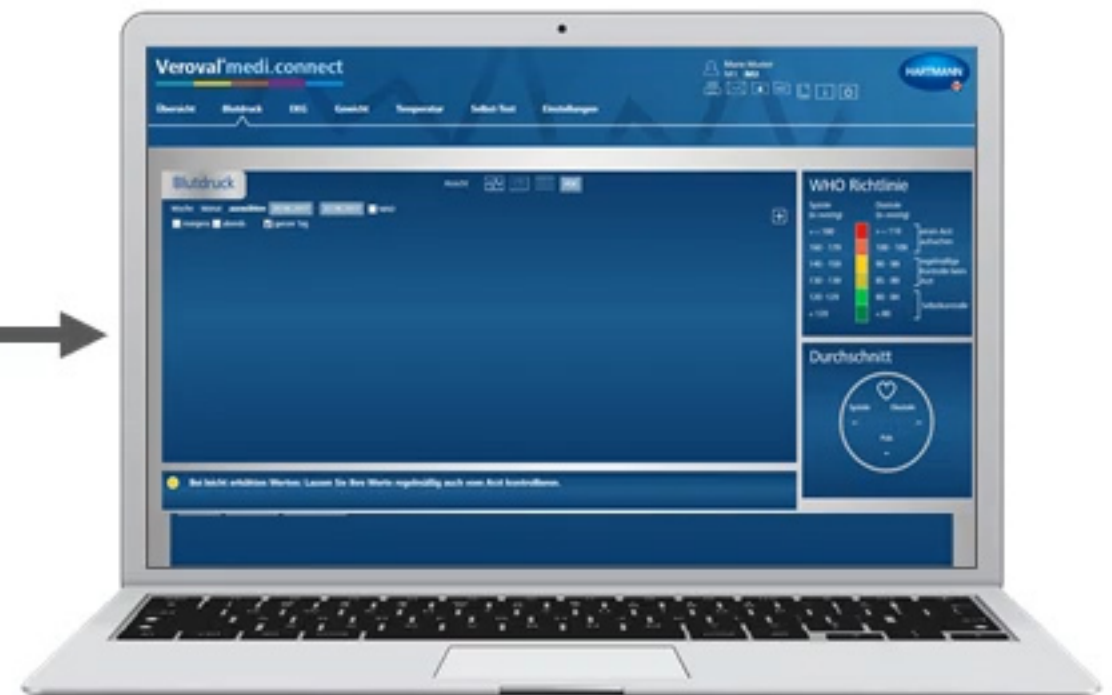


... a spojte širší koniec s vašim počítačom.

Veroval®

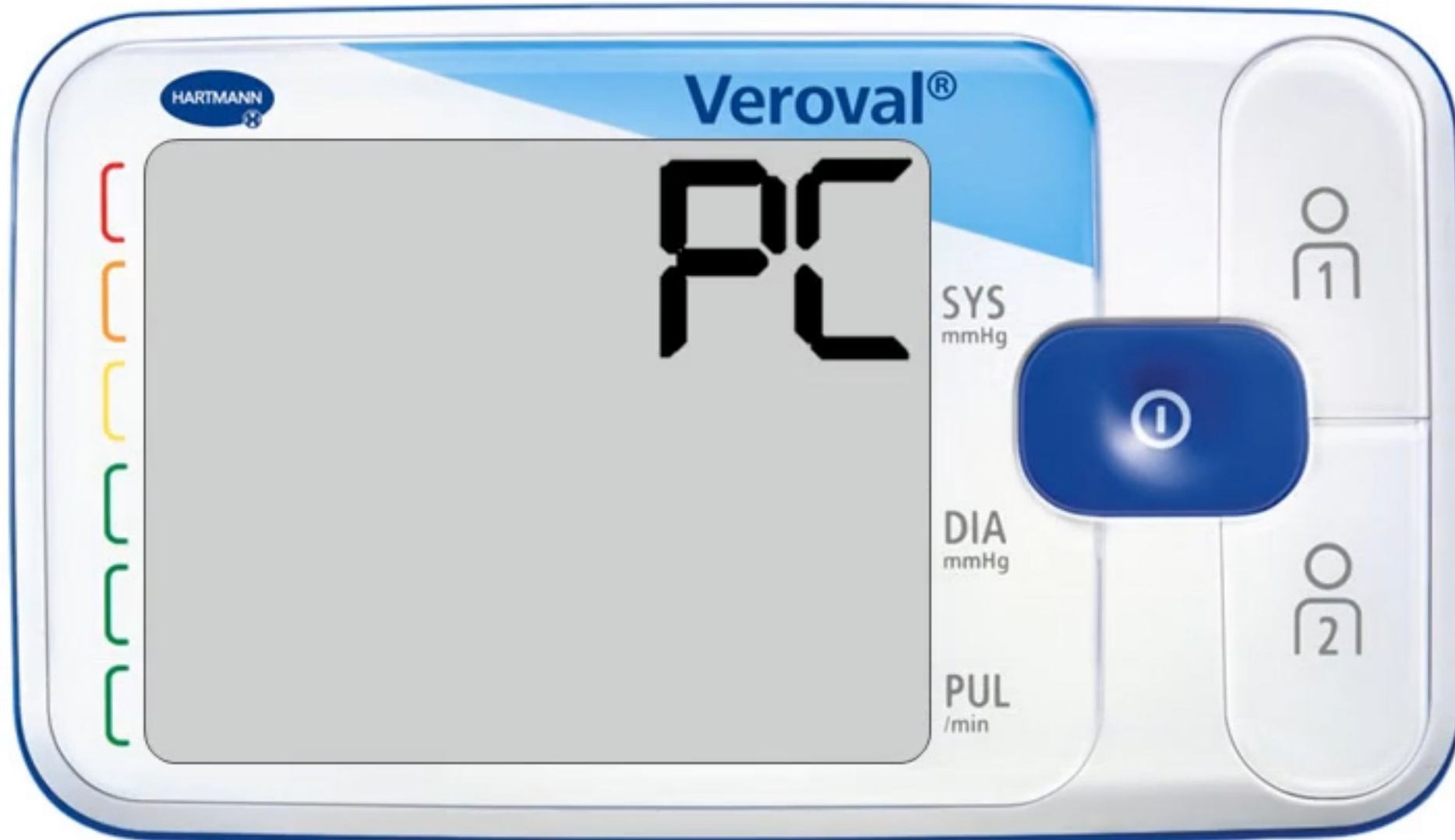


Na displeji vašho tlakomera sa objaví „PC“.

Veroval®

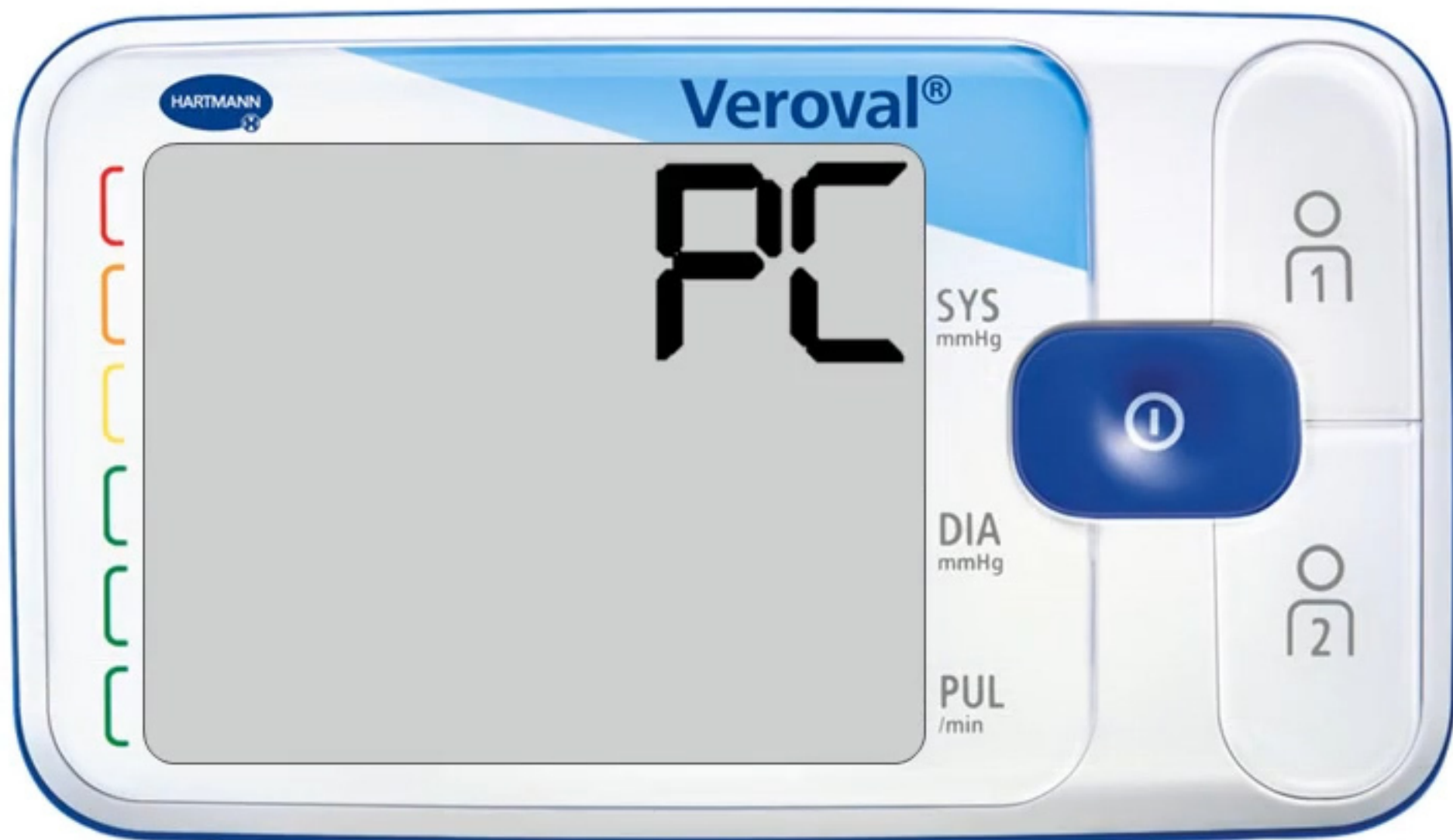

Máte 30 sekúnd na prenesenie údajov, inak sa prístroj prepne do pohotovostného režimu.

Veroval®

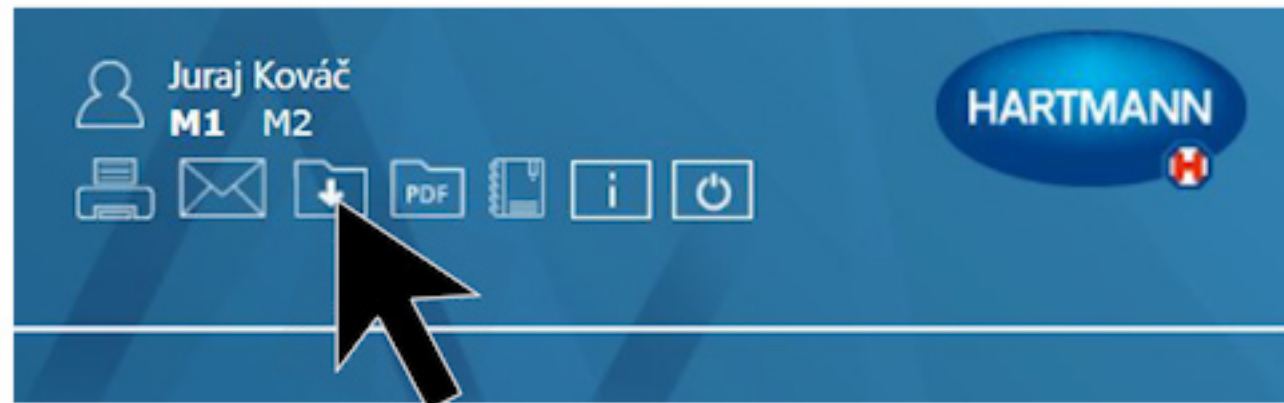


Kliknite vpravo hore na tlačidlo „Prenos údajov“...

Veroval®

The screenshot displays the Veroval web application interface. At the top right, the user is identified as Juraj Kováč, with profile icons for M1 and M2. The HARTMANN logo is also present. The main navigation bar includes 'Teplota', 'Domáci test', 'Aktivita', and 'Nastavenia'. Below this, a sub-menu shows 'Hmotnosť', 'Aktivita', 'Teplota', and 'Pripomienka'. A modal dialog box titled 'Vybrať zariadenie' is open, showing the current selection: 'Veroval ramenný tlakomer' with '2. Pamäť uložená v prístroji'. It also lists other categories: 'Veroval EKG a tlakomer' with '1. Pamäť uložená v prístroji'. A mouse cursor is pointing at the first device option. In the background, a progress bar is visible with a time indicator '(23:59)'.


... a vo výbere na požadovaný prístroj.

Veroval®

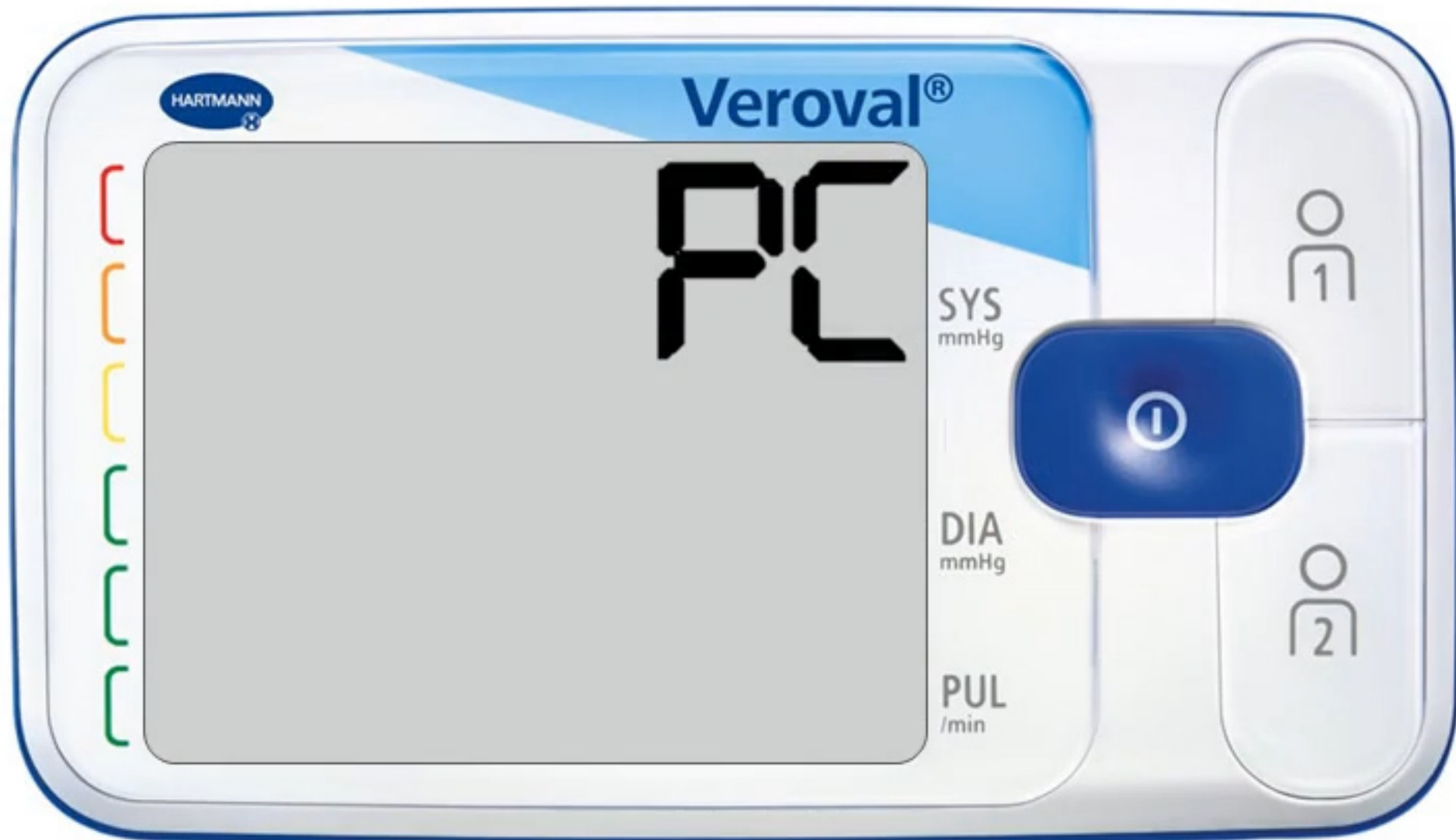

Ak údaje nebudú prenesené do 30 sekúnd,
prepne sa prístroj do pohotovostného režimu.

Veroval[®]

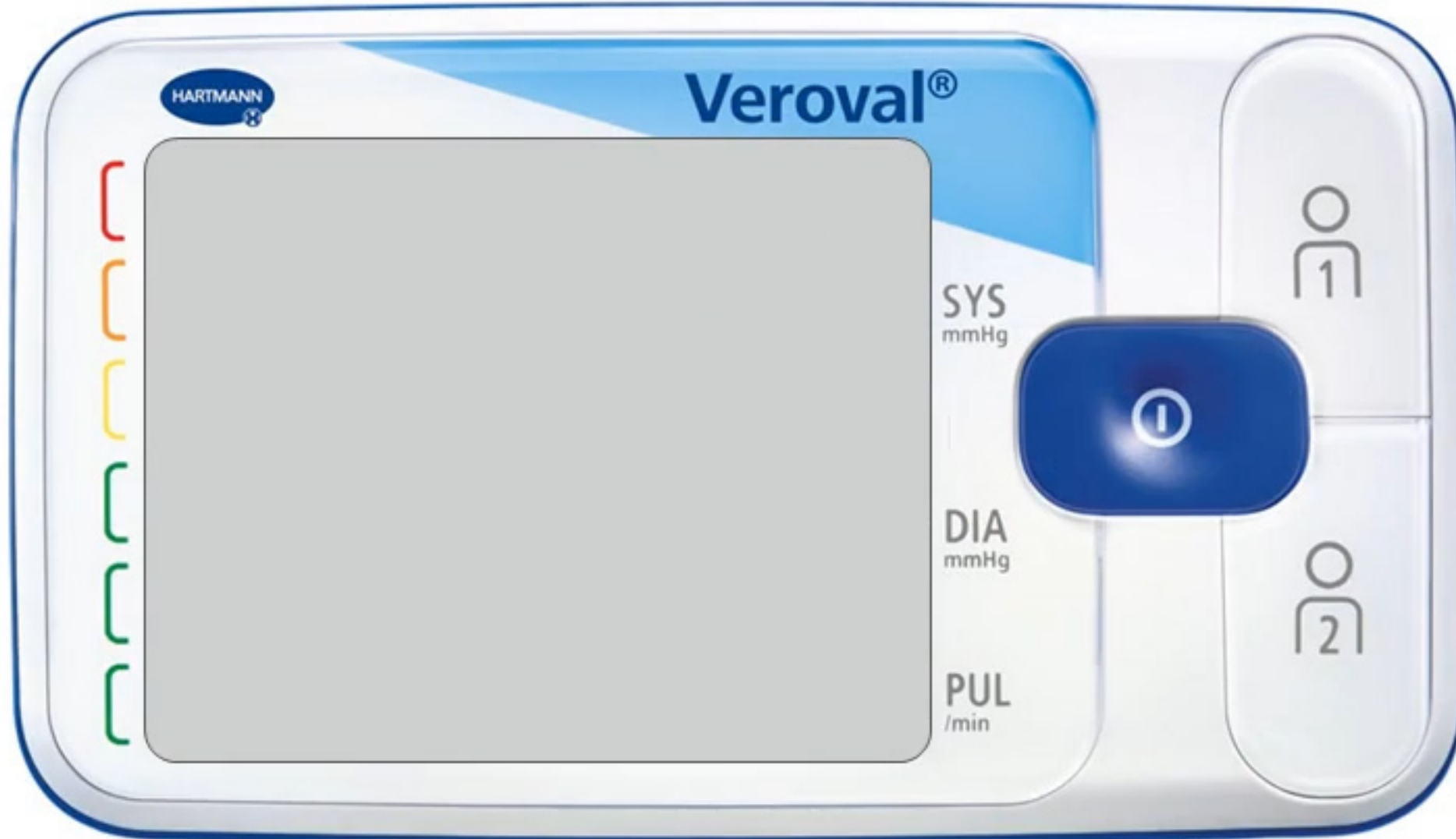

V tomto prípade, prosím, zopakujte pripojenie.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Juraj Kováč, with device IDs M1 and M2. The main navigation bar includes categories like Prehľad, Krvný tlak, EKG, Hmotnosť, Teplota, Domáci test, Aktivita, and Nastavenia. The 'Nastavenia' (Settings) section is active, showing options for 'Časové intervaly' (Time intervals) and 'Vyber prístroj' (Select device). A modal dialog box is centered on the screen, titled 'Veroval® medi.connect', with a progress bar and the message 'Údaje sa prenášajú. Čakajte chvíľu, prosím.' (Data is being transferred. Please wait a moment).

Veroval® medi.connect

Údaje sa prenášajú. Čakajte chvíľu, prosím.

Časové intervaly

ráno
(05:00 - 08:59)

(00:00) (23:59)


Vyber prístroja

- Tensoval Duo Control
- Veroval ramenný tlakomer 2. Pamäť uložená v prístroji
- Veroval záložný tlakomer


Uložiť Obnoviť Obnoviť

Teraz sa prenášajú údaje.


Veroval®

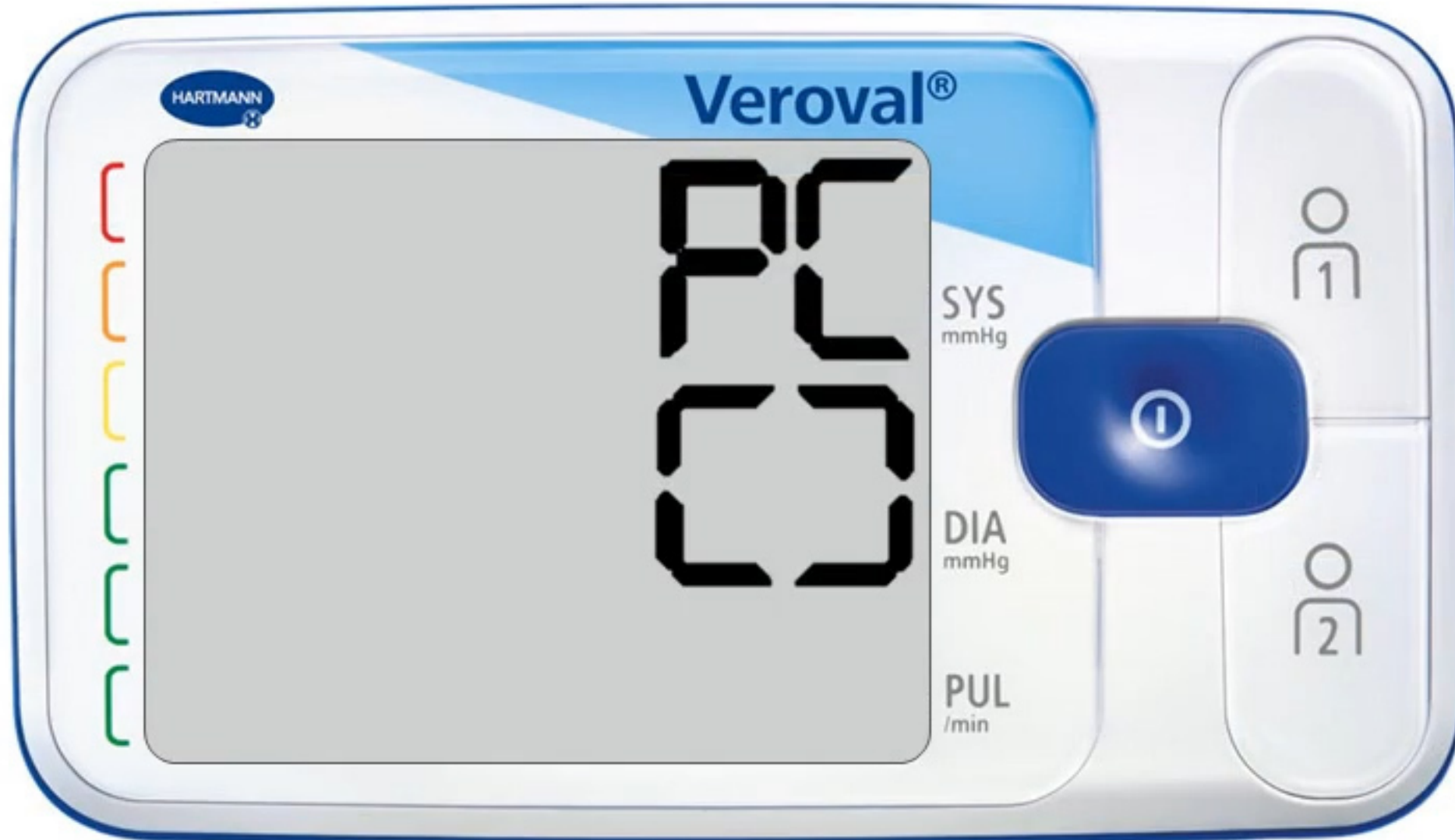


Úspešné prenesenie údajov sa zobrazí pomocou hranatej zátvorky.

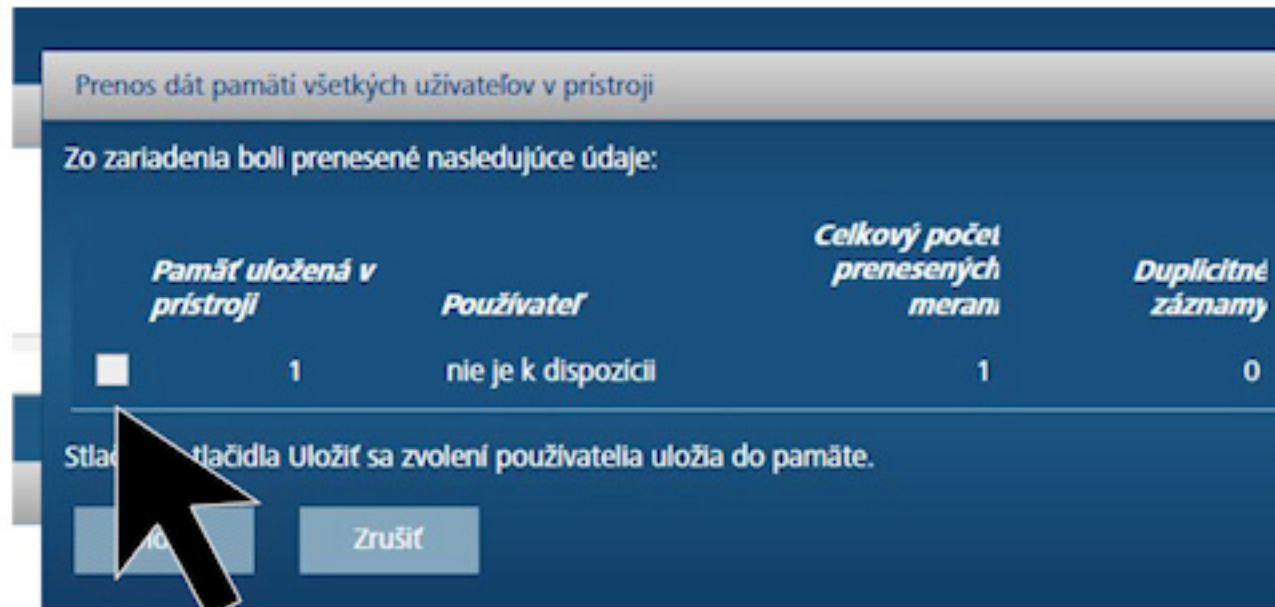


Po dokončení zvolte vaše úložisko...

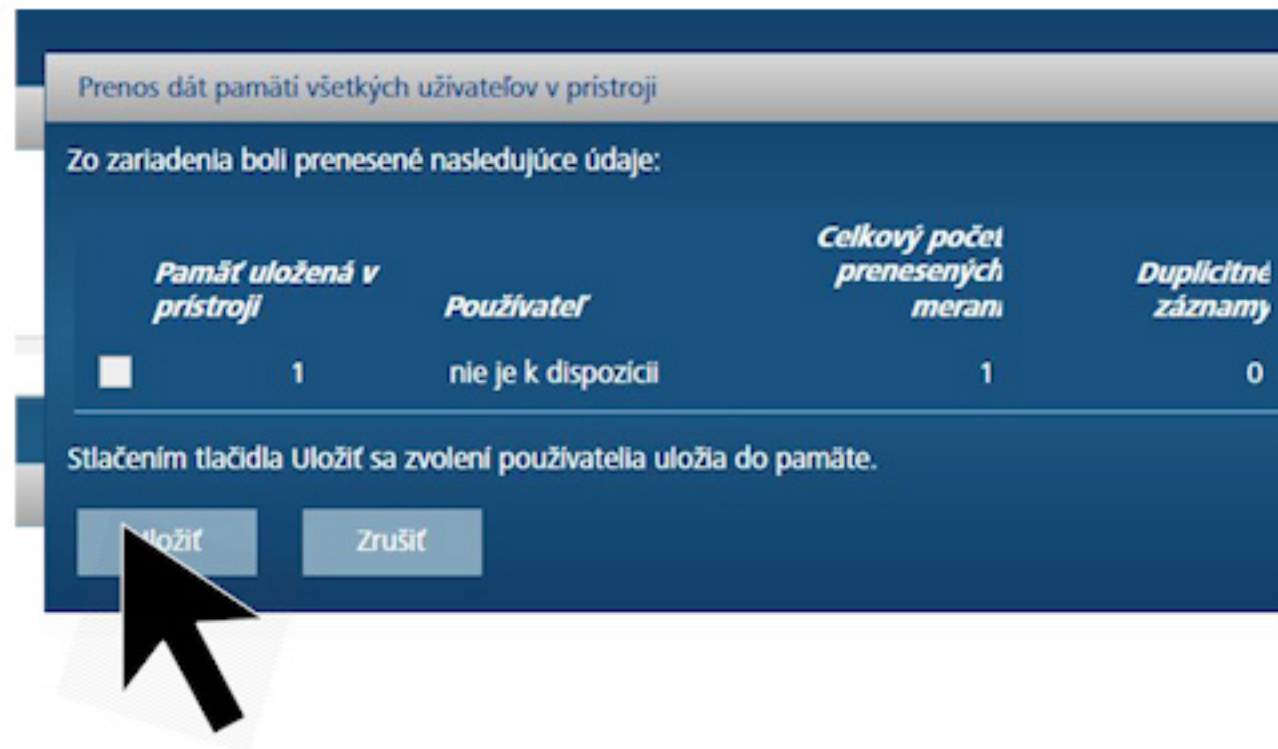

... a kliknite na „Uložiť“.

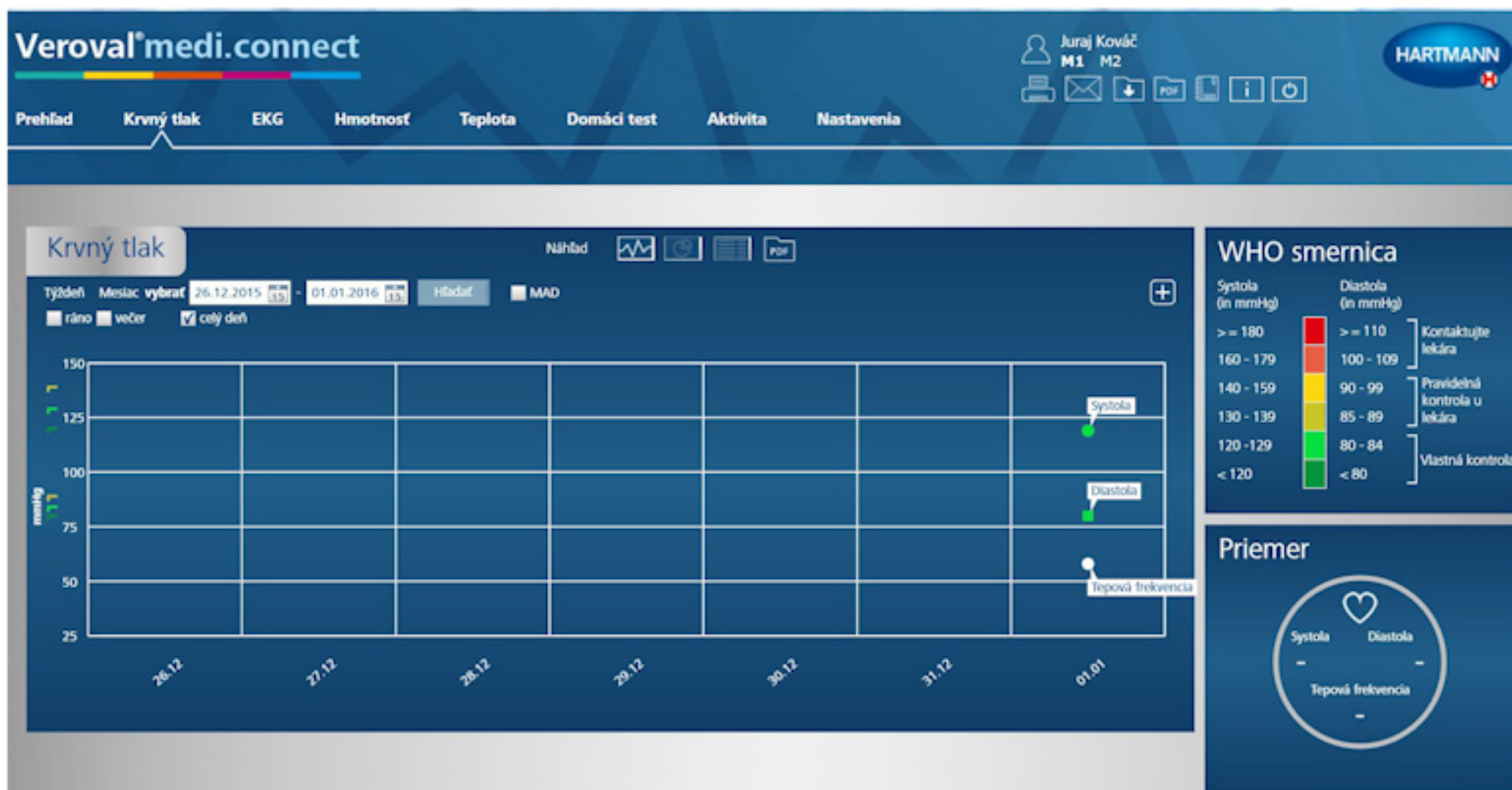

Teraz môžete všetky uložené údaje v hornej časti registra „Krvný tlak“ vyhľadať a zobrazit' napr. ako grafiku,...

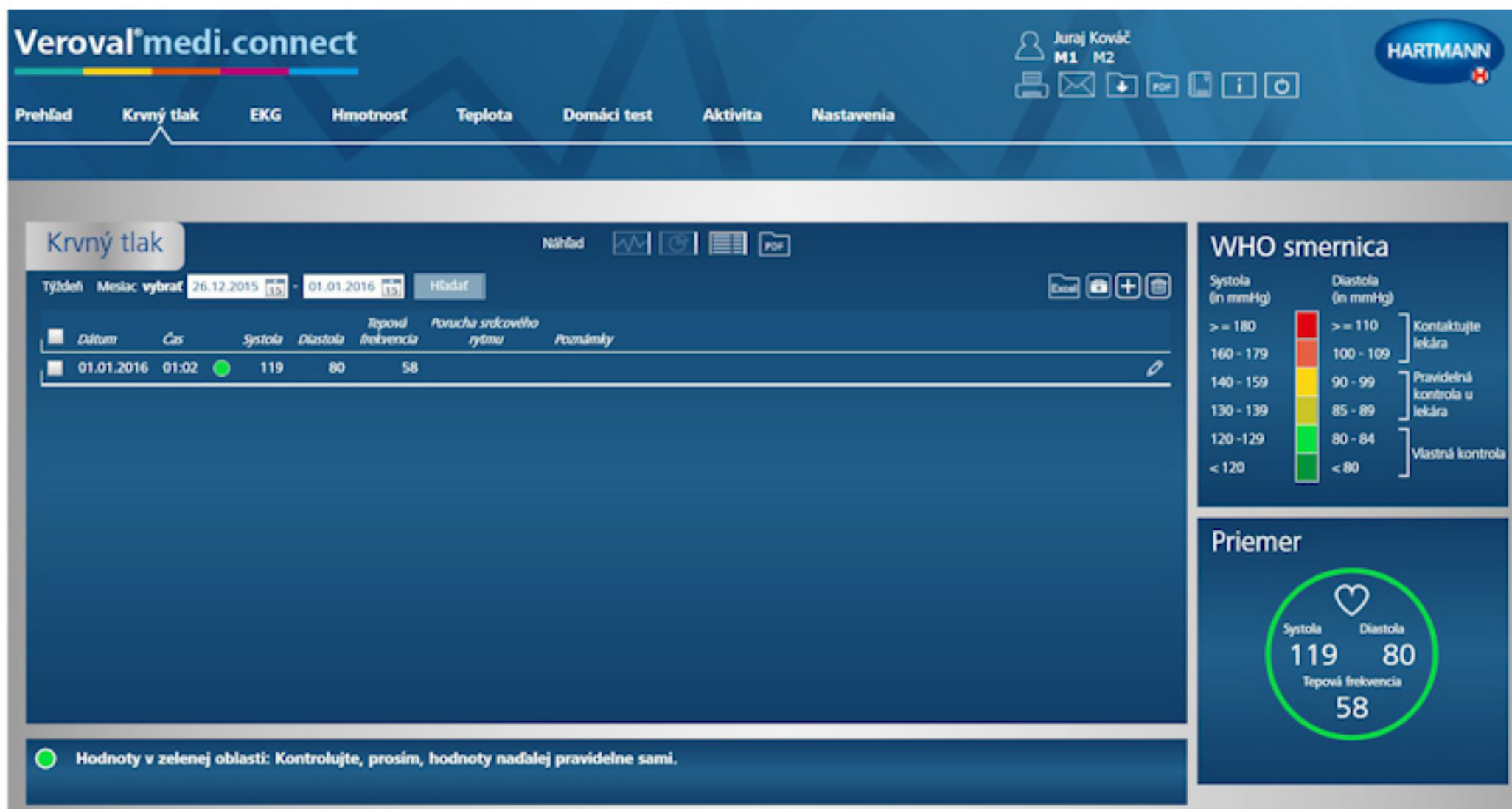

... výpis meraní...

PDF

Tlačí PDF Zvolit nové Zavrieť

Prehľad meraní krvného tlaku: 26.12.2015 - 01.01.2016

Pohlavie **Muž** Ulica **Štefánikova 1**
Meno **Juraj** PSČ **81106**
Priezvisko **Kováč** Mesto **Bratislava**
Dátum narodenia **16.02.1977** Vek (roky) **40** Výška **175**
Online služba

Medikácia
Nie sú k dispozícii žiadne dáta.

Krvný tlak

Celkový počet meraní pre zvolený časový interval: 1

Dátum	Čas	WHO	Sys. mmHg	Dia. mmHg	Temp./min	Porucha srdcového rytmu	MAD	manuálne	Analýzovať	Denná doba	Medikácia/ Poznámka
01.01.2016	01:02	●	119	80	58		93		✓		

MAD = Stredný arteriálny tlak

stlook 2016

... alebo PDF.

Veroval[®]

